



AquaTwist


Tabouret de douche pivotant

Réf: **HEXTT25**


NOTICE

1. Avant la première utilisation, vérifiez que toutes les fixations sont bien vissées et que l'assise est réglée à la hauteur souhaitée. Assurez-vous que les cliquets de réglage de la hauteur des pieds sont correctement enclenchés (voir illustration ❶ au verso).
2. Pensez à contrôler régulièrement le serrage des vis ainsi que l'état d'usure des quatre embouts présents sur chaque pied.
3. Ne montez jamais debout sur le tabouret et évitez de vous balancer lorsque vous êtes assis.
4. Utilisez et placez le tabouret dans un intérieur ventilé à température ambiante. Une exposition prolongée à des températures extrêmes (très élevées ou très basses) pourrait entraîner une usure prématurée des embouts en caoutchouc.


1 - Vérifiez le nombre de pièces

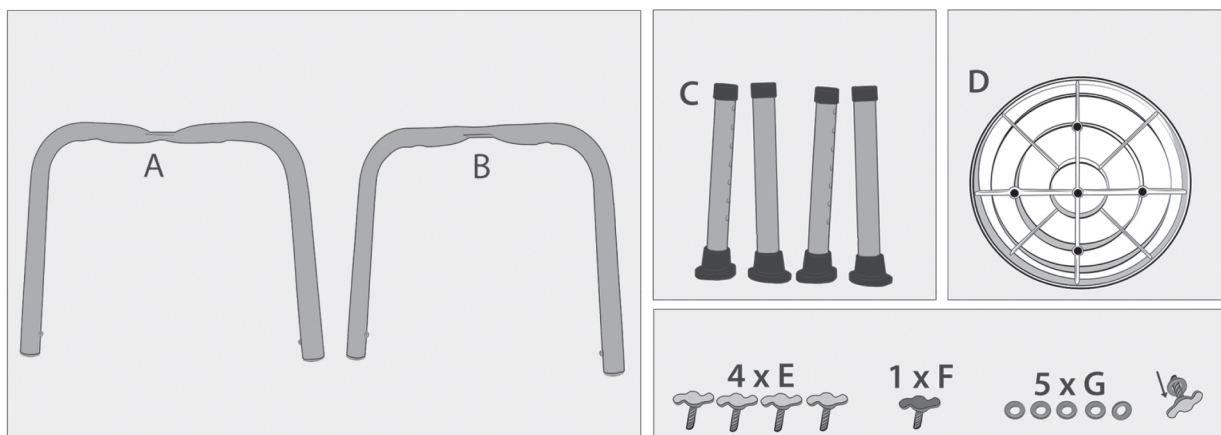


2 - Retournez le plateau et montez le 1er arceau à l'aide des vis

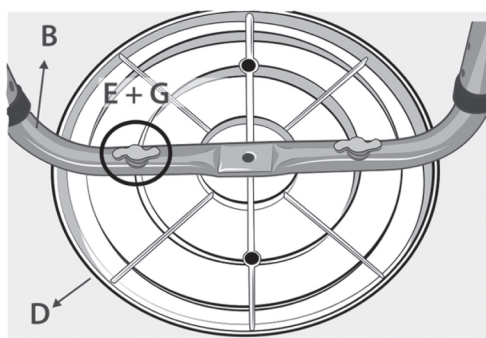

3 - Montez le 2^{ème} arceau

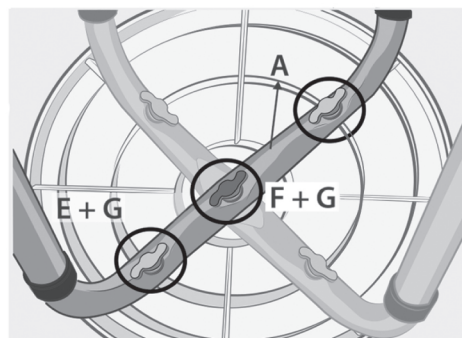

4 - Emboîtez les 4 pieds

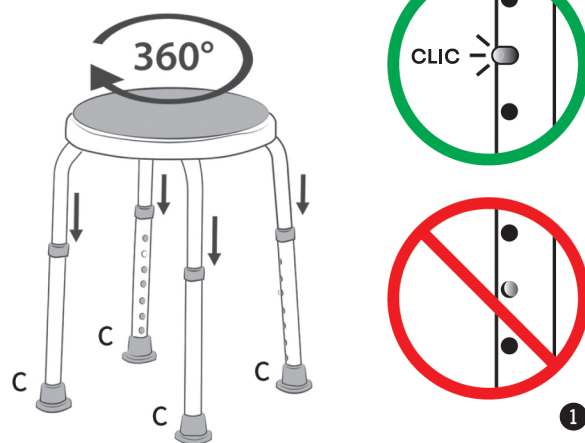

IMPORTANT : Vérifiez régulièrement le bon serrage des vis pour garantir une utilisation en toute sécurité. En cas de vis défectueuses, de jeu dans l'assise après montage ou de mauvais fonctionnement des cliquets de réglage de la hauteur, contactez votre revendeur (voir illustration ❶).