



Fiche technique

IALUSET® CREME

Nom	ialuset® crème
Référence	3401043259573
Code LPP	1335062
Classe du dispositif	Classe IIb
Composition	Acide Hyaluronique (sel sodique) (0,2%) Autres composants : cetearyl glucoside, decylester d'acide oléique, alcool cétéarylique et sodium lauryl sulfate et sodium cétéaryl sulfate, glycérol, sorbitol liquide, acide sorbique, methyl et propyl parahydroxybenzoate, citrate de sodium dihydrate, eau.
Description	ialuset® est un dispositif médical utilisé dans le traitement des plaies chroniques ou aiguës. La voie d'administration est topique. Le composant principal est l'acide hyaluronique (sel sodique, d'origine biofermentative). Le produit fini est inodore et de couleur blanc à ivoire. La crème est contenue dans un flacon pressurisé en aluminium.
Indications	Cicatrisation dans le traitement des plaies non infectées, suintantes ou surinfectées, dont les ulcères de jambe.
Précautions d'emploi	- Respecter les méthodes de nettoyage et de désinfection des plaies et de leur pourtour. Si nécessaire, un débridement du tissu nécrotique peut être effectué. - L'utilisation de ialuset® sur une ulcération veineuse ne dispense aucunement du traitement compressif (bas ou bande). - Tenir hors de la portée des enfants. - Ne pas avaler. - Usage externe. - Ne pas appliquer l'embout du flacon pressurisé directement sur la plaie. - Avant chaque utilisation, éliminer la crème présente à l'extrémité du diffuseur. - Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé. - Rapportez les produits périmés ou non utilisés à votre pharmacien qui se chargera de leur élimination. - Ne pas utiliser pour un usage cosmétique.
Conditionnement	Flacon pressurisé de 100g