



**Fiche technique**  
**IALUSET® PLUS CREME**

Nom	Ialuset® PLUS Crème
Référence	3401079348692
Code LPP	Non remboursé
Classe du dispositif	Classe III
Composition	Acide Hyaluronique (sel sodique) (0,2%), sulfadiazine argentique (1%) Autres composants : decylester d'acide oléique, alcool cétéarylique et sodiumlauryl sulfate et sodium cétéaryl sulfate, macrogol, sorbitol liquide, glycérol, eau.
Description	La voie d'administration est topique. Les composants actifs sont l'acide hyaluronique (sel sodique, d'origine biofermentative) et la sulfadiazine argentique. Le produit fini est inodore et de couleur blanc à ivoire. La crème est contenue dans un tube operculé en aluminium.
Indications	Cicatrisation des plaies infectées et des brûlures, des affections dermatologiques primitivement bactériennes ou susceptibles de se surinfecter.
Précautions d'emploi	<ul style="list-style-type: none"><li>- La durée du traitement est limitée à un mois</li><li>- Respecter les méthodes de nettoyage et de désinfection des brûlures et des plaies, ainsi que de leurs pourtours. L'association de ialuset® PLUS à une détersion enzymatique n'a pas été étudiée.</li><li>- Eviter d'exposer les parties du corps traitées par ialuset® PLUS à une lumière vive (risque de photosensibilisation). Une coloration transitoire du lit de la plaie peut apparaître, qui peut être éliminée par simple lavage.</li><li>- Chez les sujets souffrant d'une insuffisance rénale ou hépatique, éviter l'application de la crème sur les plaies ouvertes.</li><li>- Enfant : ialuset® PLUS doit être utilisé avec prudence chez l'enfant de plus de 2 ans, la durée du traitement ne doit pas dépasser 15 jours sans avis médical.</li><li>- Bien refermer le tube après utilisation. Ne pas appliquer l'embout du tube directement sur la plaie.</li><li>- Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé.</li><li>- Tenir hors de la portée des enfants.</li><li>- Ne pas avaler.</li><li>- Rapportez les produits périmés ou non utilisés à votre pharmacien qui se chargera de leur élimination.</li><li>- Grossesse et allaitement : ialuset® PLUS doit être utilisé chez la femme enceinte et allaitante uniquement lorsque cela est nécessaire.</li></ul>
Conditionnement	Tube de 100g