



iD Slip Plus

iD Slip Plus est un change complet qui offre un haut niveau d'absorption pour les personnes à mobilité réduite et qui est facilement changeable, même en position allongée. Ce change complet, entièrement respirable, garantit confort et sécurité tout en offrant une sensation de douceur. Il possède une absorption rapide et un garde au sec instantané. La gamme garantit un système de contrôle des odeurs et des témoins d'humidité indiquent quand la couche doit être changée. En outre, la gamme complète iD Slip a été approuvée par les dermatologues.




*visual not representative of product packaging

Approuvé par des dermatologues



Toutes nos protections iD sont approuvées par des dermatologues par le biais de tests réguliers afin de garantir l'intégrité de la peau des utilisateurs.

Confort et sécurité

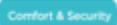

La gamme iD Slip offre aux utilisateurs confort et sécurité grâce à la combinaison absorption rapide/garde au sec instantanée, une protection 100% respirable et un voile intérieur très doux.

Absorption rapide & garde au sec instantanée

La rétention rapide des liquides offre une garde au sec renforcée.

100% respirable

Une enveloppe extérieure 100% respirable aide à maintenir une peau saine.

Contrôle des odeurs

Un système de contrôle des odeurs dans le tampon absorbant contribue à neutraliser les odeurs désagréables.

Double indicateur d'humidité

Le double indicateur d'humidité sert de guide pour savoir quand il faut changer de produit.

Toucher coton

Une enveloppe extérieure au toucher textile offre un maximum de confort et de discrétion

Barrières anti-fuites

Les barrières anti-fuites intégrées hydrophobes empêchent les fuites latérales, tout en maintenant sécurité et confort.



POSITION DEBOUT



Commencez par plier la protection iD Expert Slip en deux dans le sens de la longueur, laissez vos doigts sur le non tissé et faites les bouger de part et d'autres afin de redresser les barrières anti-fuites."



Passez ensuite la protection iD Expert Slip entre les jambes de l'avant vers l'arrière en déployant les extrémités et en s'assurant que l'extrémité supérieure soit positionnée sur le coccyx. Assurez-vous que la protection soit centrée correctement en utilisant les indicateurs de miction comme repère.



Ensuite, fixez les adhésifs du bas afin d'assurer un bon maintien au niveau des jambes. Positionnez ensuite les adhésifs du haut afin d'ajuster la protection au niveau de la taille.



Enfin, ajustez pour un confort optimal. Assurez-vous que les velcros soient collés correctement. À la fois le haut et le bas des adhésifs peuvent être fixés soit dans une position angulaire ou linéaire. Ils peuvent également être refermés et réajustés si nécessaire."



POSITION COUCHEE



Commencez par plier la protection iD Expert Slip en deux dans le sens de la longueur, laissez vos doigts sur le non tissé et faites les bouger de part et d'autres afin de redresser les barrières anti-fuites.




Tournez la personne délicatement sur le côté, en position de sécurité (légèrement plier la jambe supérieure afin qu'il/elle ne tombe pas hors du lit), mettre la protection à l'arrière de la personne en s'assurant que le haut de la pulpe se situe à la base du pli-inter fessier.

Centrez la protection en utilisant les indicateurs de miction comme guide. Maintenez votre gouttière formée et passez la protection entre les jambes de la personne."



Remettez la personne sur le dos et ramenez le produit entre les jambes en s'assurant que les barrières anti-fuites restent activées, ensuite ajuster l'avant de la protection. Si nécessaire, tournez à nouveau la personne sur le côté afin de vous assurer que l'arrière de la protection et que les adhésifs de fixation soient correctement positionnés.

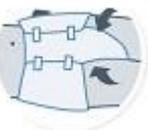

Ensuite, fixez les adhésifs du bas afin d'assurer un bon maintien au niveau des jambes. Puis, fixez les adhésifs du haut en position horizontale afin d'assurer un bon maintien autour de la taille. Vérifiez le confort et l'ajustement (les adhésifs peuvent être repositionnés. Assurez-vous que les adhésifs soient collés correctement.