



Medline International France SAS
2 rue Rene Caudron,
Bâtiment 13F
Parc d'Affaires le Val Saint Quentin
78960 Voisins le Bretonneux
France

Tél. : +33 1 30 05 34 00
Fax : +33 1 30 05 34 43
www.medline.eu/fr



HCS893

Fiche technique

Nébuliseurs à faible volume :

Référence(s)

Référence	Diamètre du nébuliseur		Tubulure de 210 cm		Connecteur en T	Tubulure ondulée réservoir	Masque aérosol		Embout buccal
	18mm	22 mm	Standard	Universel			Adulte	Pédiatrique	-
HCS880	X								
HCS883	X		X		X	X			X
HCS890		X							
HCS891		X	X		X				
HCS892		X	X		X				X
HCS893		X	X				X		
HCS894		X	X					X	
HCS895		X		X	X	X			X
HCS898		X		X			X		

Description

Les mini-nébuliseurs (petit volume) sont utilisés pour nébuliser des solutions médicamenteuses liquides destinées à l'inhalation (aérosolthérapie). Le médicament est rempli dans le nébuliseur qui est connecté à de l'air comprimé ou à une source d'oxygène par l'intermédiaire d'une tubulure d'oxygène. En fournissant l'air/l'oxygène comprimé avec le débit requis, un effet venturi est créé dans le nébuliseur qui achemine le médicament le long d'une plaque de distribution verte et le projette contre une plaque déflectrice, au travers de laquelle des aérosols de taille appropriée sont générés. Les aérosols générés peuvent être inhalés.

Selon la configuration, un embout buccal ou un masque aérosol sont disponibles pour l'inhalation. Selon la configuration, d'autres accessoires sont disponibles : - Un tube qui sert de réservoir au médicament nébulisé, un raccord en T sur lequel le nébuliseur est fixé, qui, à son tour, sert de distributeur et sur lequel l'embout buccal et la tubulure du réservoir sont fixés.

Ne pas utiliser sur plusieurs patients (dispositif à usage unique).

Matières :

Nébuliseur : Polystyrène (cuve et jet), polypropylène (capuchon)
Raccord en T Polypropylène
Embout buccal: Polypropylène
Tubulure de réservoir ondulée: Éthylène-acétate de vinyle ou polyéthylène basse densité/engagé

Coque de masque, tubulure d'alimentation, raccords de tubulure: Chlorure de polyvinyle
Pince-nez: Aluminium
Sangle élastique avec aglets: Nylon, Spandex

Sans latex de caoutchouc naturel

Durée de conservation : Date limite d'utilisation et de péremption



0344



Sans latex



Conditionnement	Emballé individuellement dans des sachets en plastique 50 unités par carton.
Emballage	Emballage en polyéthylène non stérile (PE)
Fabricant légal	Besmed Health Business Corp. No. 5, Lane 116, Wu-Kong 2nd Road, Wu-Ku District, New Taipei City, 24888, Taiwan
Réglementation	Conforme à la Directive 93/42/CEE Classe du dispositif : IIa non-stérile • Veuillez consulter l'étiquetage complet avant d'utiliser le produit.
Autres informations	NA

Numéro du document : EU1-00004-F-00025 Titre du document : FINT.441 - Technical sheet Révision : 9

