

## Préparation du médicament

# Broyeur de comprimés Severo®

### Broyeur Severo®

- ▶ Dimensions : L. 80 x P. 70 x H. 217 mm
- ▶ Autonomie : 500 cycles de broyage (≈ 3 jours d'utilisation en continu)
- ▶ Alimentation par batterie rechargeable (chargeur fourni)
- ▶ Poids : ≈ 1,5 kg
- ▶ Niveau sonore : 52 db
- ▶ Temps de chargement : 2 heures
- ▶ Garantie : 2 ans pour l'appareil et 1 an pour la batterie

Désignation	Référence
<b>Broyeur de comprimés Severo®</b>	NA00030.01

### Accessoires

Désignation	Référence
<b>2100 gobelets à usage unique</b>	NA00014.01
<b>2000 couvercles à usage unique</b>	NA00015.01
<b>2100 rondelles à usage unique</b>	NA00016
<b>Stabilisateur Severo®</b>	NA00040

### Utilisation



1 Placez les médicaments dans le gobelet sans dépasser la première ligne.



2 Placez une rondelle puis la tête de broyage sur le gobelet. La rondelle est conseillée mais pas obligatoire.



3 Ouvrez le couvercle du Severo® en appuyant sur le bouton métallique.



4 Placez le gobelet avec la tête de broyage sur le plateau.



5 Fermez le couvercle du Severo® en exerçant une légère pression.



6 Appuyez sur le bouton d'alimentation pour que le processus de broyage commence. La LED du bouton passe au vert une fois le broyage terminé.



7 Ouvrez le couvercle du Severo®. Soulevez la rondelle et la tête de broyage. Les médicaments sont réduits en fine poudre et peuvent être mélangés aux repas des patients ou au gel à avaler.



### Gel à avaler

Le gel à avaler permet de masquer le goût amer des médicaments et n'affecte pas son action. Il ne contient ni sucre, ni alcool, ni substances allergènes courantes. Il convient à tous les patients.

Désignation	Référence
<b>Gel saveur banane - 8 mL</b>	NA00046
<b>Gel saveur banane - 150 mL</b>	NA00044
<b>Gel saveur banane - 1L</b>	NA00045
<b>Gel saveur tutti frutti - 8 mL</b>	NA00043
<b>Gel saveur tutti frutti - 150 mL</b>	NA00041
<b>Gel saveur tutti frutti - 1L</b>	NA00042