

Préparation du médicament

Écrase-comprimés Tookan®

L'écrase-comprimés Tookan® permet de réduire les comprimés en une fine poudre, **sans risque de troubles musculo-squelettiques**. Le broyage s'effectue du bout des doigts, sans effort ni à-coups.

Grâce à ses sachets, le Tookan® permet d'**éviter les contaminations croisées ainsi que l'inhalation de particules médicamenteuses**.

L'hygiène est donc totalement respectée !



Hygène



Ergonomie

Points forts

- ▶ Broyage sans effort
- ▶ Facile d'utilisation
- ▶ Stockage des sachets dans l'appareil
- ▶ Matériaux résistants aux produits de désinfection des milieux hospitaliers

Écrase-comprimés Tookan®

Caractéristiques techniques

Écrase-comprimés Tookan®

- ▶ Base en tôle acier peinte époxy
- ▶ Poignée en polyamide
- ▶ Mâchoire en aluminium anodisé
- ▶ Axes en inox
- ▶ Poids : 1,4 kg

Sachets pour écrase-comprimés

- ▶ Polyéthylène basse densité transparent
- ▶ Épaisseur : 180/200 µm
- ▶ Respectueux de l'environnement



Désignation	Dimensions (en mm)	Référence
Écrase-comprimés manuel Tookan®	L. 265 x P. 75 x H. 90	NA00017_V02
1000 sachets universels pour écrase-comprimés	L. 50 x H. 100	NA00011.01


Utilisation



1 Prenez un sachet rangé dans le bac de stockage.



2 Placez les médicaments dans le sachet puis repliez-le.

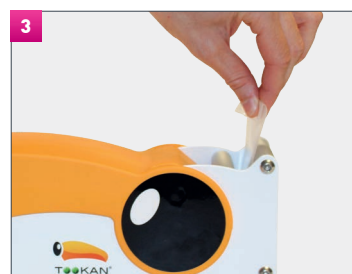

3 Insérez le sachet dans la mâchoire du broyeur.



4 Donnez quelques pressions sur la poignée, du bout des doigts, sans lâcher le sachet.



5 Récupérez les médicaments réduits en fine poudre.