

# Dermactyl A2B

Traitement préventif des escarres chez les personnes alitées ou dépendantes.  
 Risque modéré à fort.  
 Pour une peau mieux protégée contre le risque d'escarre.



Renforce la peau à l'intérieur

Protège des bactéries pathogènes extérieures

Dispositif médical de classe I

## INDICATIONS

- Prévention de l'escarre
- Surveillance des points d'appui par effleurage
- Adultes
- Peaux sèches et fragilisées

## CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES ET PHYSICO-CHIMIQUES

Aspect : émulsion épaisse à effet quickbreak  
 Couleur : blanche à beige clair.  
 Odeur : neutre.  
 Masse volumique à 20°C : 0,99 +/- 0,02 g/ml  
 pH du produit pur à 20°C : 6,3 +/- 0,5

## TOLERANCE

- Tolérance cutanée : non irritant, non sensibilisant

## COMPOSITION INCI

AQUA (WATER), ETHYLHEXYL PALMITATE, GLYCERIN, POLYOLENE GLYCOL DIPELARGONATE, SQUALANE, SODIUM POLYACRYLATE, SUCROSE STEARATE, POLYMETHYL METHACRYLATE, PECTIN, TETRASODIUM EDTA, LONICERA CAPRIFOLIUM (HONEYSUCKLE) FLOWER EXTRACT, CENTELLA ASIATICA LEAF EXTRACT, LONICERA JAPONICA (HONEYSUCKLE) FLOWER EXTRACT, MALTODEXTRIN, SILICA

## COMPOSITION

Émulsion Quickbreak innovante composée de glycérine végétale, de phytosqualane, et d'une association synergique de pectine de pomme et d'hydrocotyle asiatique (brevet Rivaprotect®).

## PROPRIETES

Caractéristiques	Avantages
Formule enrichie en glycérine végétale et en phytosqualane	Hydrate* la peau dès la 1ère application Maintien l'hydratation et prévient du dessèchement cutané à long terme
Association brevetée de pectine de pomme et d'hydrocotyle asiatique	Améliore les propriétés biomécaniques de la peau : renforce l'extensibilité et la tonicité cutanée**
Emulsion quickbreak	Empêche l'adhésion des bactéries exogènes (étude sur S.aureus, E.coli). Protège le microbiote naturel.
	L'émulsion fond et se transforme en huile pour un glissement facilité

\* hydratation des couches supérieures de l'épiderme, mesures cornéométriques sur 11 volontaires

\*\* Résultats d'un tests d'usage sous contrôle dermatologique avec mesures instrumentales et scorages cliniques : étude sur la zone trochantérienne sur 15 à 20 sujets de plus de 60 ans ayant la peau sèche ; 3 applications par jour pendant 21 jour

## CONSEILS D'UTILISATION

DERMACTYL A2B s'utilise dans le cadre d'un protocole global de prévention de l'escarre.

Appliquer en moyenne une quantité équivalente à 1 pression de DERMACTYL A2B sur la peau de la zone à risque. La quantité de produit à appliquer dépend de la largeur de la zone à effleurer et de l'état cutané. Effectuer des mouvements circulaires légers avec la pulpe des doigts en répartissant de façon homogène le produit. DERMACTYL A2B va changer de texture pendant l'effleurage, passant d'émulsion à huile et facilitant ainsi le glissement des doigts sur la peau.

Renouveler l'opération sur chaque zone à risque 2 à 4 fois par jour.

## PRECAUTIONS D'EMPLOI

Ne pas utiliser sur une peau lésée : zones présentant des lésions cutanées (exemple : dermatoses infectieuses), zones cutanées inflammatoires, érythème persistant à la pression.

Ne pas utiliser si le tube est endommagé.

Usage externe. Ne pas avaler. Ne pas appliquer sur les yeux et les muqueuses.

**Condition de conservation :** entre 15 et 30°C. Peut supporter des pics de chaleurs de quelques jours jusqu'à 40°C sans être endommagé.

## PRESENTATION

Réseau	Présentation	Référence	Code EAN	Conditionnement	Composition du contenant
	Tube 50ml+étui	RIV79512	3361370795123	Carton de 6	Tube : PEHD / Capsule / Etui

Lien fiche produit : [https://www.hexaplus.fr/rh/a\\_produit/voir/20288](https://www.hexaplus.fr/rh/a_produit/voir/20288)

## INFORMATIONS PRATIQUES

**Durée de conservation :** 36 mois

**Durée d'utilisation après ouverture :** 6 mois

**Consigne de tri :** A recycler

**Statut :** Dispositif médical de classe 1

## CONTACTS

Pour plus d'informations vous pouvez contacter notre Service Relations Clients : [client@rivadispro.com](mailto:client@rivadispro.com) ou 05 49 68 99 70

Disponible en commande sur notre site internet [Rivadispro.com](http://Rivadispro.com)

