

# Crème barrière protectrice

Protège la peau de l'incontinent adulte en formant une barrière protectrice. Préviend la macération et l'irritation cutanées dues au contact avec les irritants (excrétions corporelles). Entre dans un protocole global de prévention de la dermatite associée à l'incontinence et des escarres par macération

*Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE.*



Prévention de la dermatite associée à l'incontinence (DAI) et l'escarre par macération

Hypoallergénique :  
Formulés pour minimiser les risques de réactions allergiques

Dispositif médical  
de classe I

## INDICATIONS

- Adultes
- Peaux sensibles et fragilisées
- Indiqué pour prévenir la dermatite associée à l'incontinence et l'escarre par macération

## CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES ET PHYSICO-CHIMIQUES

- Aspect : crème épaisse
- Couleur : blanc
- Odeur : sans parfum
- pH à 20°C (produit pur) : 7,0 +/- 0,5

## TOLERANCE

- Tolérance cutanée : non irritant
- Tolérance oculaire : cytotoxicité faible
- Testé sous contrôle dermatologique
- Hypoallergénique : formulé pour minimiser les risques de réactions allergiques.

## COMPOSITION INCI

AQUA (WATER), PARAFFINUM LIQUIDUM (MINERAL OIL), ZINC OXIDE, LANOLIN, GLYCERIN, CERA MICROCRISTALLINA (MICROCRYSTALLINE WAX), GLYCERYL STEARATE, PEG-100 STEARATE, C14-22 ALCOHOLS, PARAFFIN, CETYL ALCOHOL, C12-20 ALKYL GLUCOSIDE, ETHYLHEXYLGLYCERIN, CITRIC ACID, XANTHAN GUM, LONICERA CAPRIFOLIUM (HONEYSUCKLE) FLOWER EXTRACT, LONICERA JAPONICA (HONEYSUCKLE) FLOWER EXTRACT, ALOE BARBADENSIS LEAF JUICE POWDER, TOCOPHEROL

## COMPOSITION

- Crème blanche : forme une barrière protectrice qui préserve la peau du contact avec les excréments corporelles : prévient la macération et l'irritation cutanée
- Oxyde de zinc (12%) d'origine naturelle (minérale) : propriétés asséchantes, antiseptiques et protectrices de l'épiderme
- Lanoline : émollient qui adoucit la peau et hydrate\* efficacement
- Complexe hydratant : extrait naturel d'aloë vera + glycérine végétale : propriétés hydratantes\*, protectrices et adoucissantes

\*Hydratation des couches supérieures de l'épiderme

## PROPRIETES

Les performances revendiquées sont:

**Activité principale:** crée une barrière protectrice sur la peau et maintient la barrière naturelle de la peau et ses propriétés biomécaniques: A chaque application, la **CREME BARRIERE PROTECTRICE** crée une barrière physique qui bloque les irritants et l'humidité extérieurs à venir au contact de la peau ;

Les ingrédients de la **CREME BARRIERE PROTECTRICE** maintiennent et assouplissent la barrière naturelle de la peau minimisant l'impact des frictions.

**Galénique et conditionnement :** la **CREME BARRIERE PROTECTRICE** se présente sous la forme d'une crème huile-dans-eau blanche de texture épaisse et facile d'application.

Elle n'obstrue pas le change complet et la couche qui conservent tout leur pouvoir d'absorption.

Son conditionnement en tube plastique et sa texture facilitent son utilisation et son application.

## CONSEILS D'UTILISATION

La peau doit être propre. Après un épisode d'incontinence, la zone sacrée et/ou périnéale doit être lavée par un produit doux, puis séchée par tamponnement. Appliquer en fine couche la crème sur la zone à risque tout en limitant les frictions cutanées. Répartir uniformément. La **CREME BARRIERE PROTECTRICE** s'applique après chaque épisode d'incontinence et changement de protections hygiéniques.

## PRECAUTIONS D'EMPLOI

Usage externe uniquement. Ne pas utiliser sur peau lésée. Ne pas avaler. Ne pas appliquer sur les yeux et les muqueuses. Ne pas utiliser si le tube est endommagé.

## PRESENTATION

Présentation	Code	Code EAN	Conditionnement	Composition du contenant
Tube 100 g	79531	3361370795314	Carton de 6	Tube : COEX PEHD/PEBD

## INFORMATIONS PRATIQUES

Durée de conservation : 24 mois

Durée d'utilisation après ouverture : 6 mois

Consigne de tri : A recycler

Statut : Dispositif Médical de classe I

## CONTACTS

Pour plus d'informations vous pouvez contacter notre Service Relations Clients : [client@rivadispro.com](mailto:client@rivadispro.com) ou 05 49 68 99 70

Disponible en commande sur notre site internet [Rivadispro.com](http://Rivadispro.com)

