

GÉOLOCALISER À DISTANCE LE CLICK NOMADE



Connectez-vous sur votre espace client en ligne <https://client.senioradom.com> ou sur l'application SeniorAdom pour connaître la dernière position du CLICK.

Cette donnée est actualisée toutes les 20 minutes.

PARAMÉTRER UNE OU PLUSIEURS ZONES DE SÉCURITÉ



Le paramétrage d'une ou plusieurs zones de sécurité peut se faire sur votre espace client en ligne <https://client.senioradom.com> ou sur l'application SeniorAdom.

L'aidant reçoit un SMS ou un email (suivant vos paramètres sur les alertes préventives) à chaque entrée et sortie du bénéficiaire des zones définies.

SIGNIFICATION DES LEDS

LED/Statut	BLEUE	VERTE
Allumée (lumière fixe)	L'appareil est en cours de charge	Aucune carte SIM détectée
Clignote lentement	Appareil chargé et prêt à usage	L'appareil est en train de se connecter au réseau téléphonique
Clignote rapidement	Niveau de charge inférieur à 20%	L'appareil est connecté au réseau téléphonique

En fonctionnement normal, la LED **bleue** clignote lentement et la LED **verte** clignote rapidement.

Lorsque votre CLICK est resté immobile et inutilisé pendant un certain temps, les LEDs s'éteignent pour garder de l'autonomie. Elles se rallumeront dès que vous le reprendrez en main, environ 5 secondes après.

PRÉCAUTIONS D'USAGE

Pour le bon fonctionnement de votre CLICK, merci de respecter les instructions suivantes:

1. Ne pas utiliser et ranger l'appareil dans des endroits poussiéreux.
2. Ne pas mettre l'appareil dans des endroits surchauffés ou trop froids.
3. Nettoyer l'appareil avec un chiffon sec.
4. Ne pas démonter ou tenter de réparer l'appareil vous-même. En cas de dysfonctionnement, contactez le service technique.
5. L'utilisation d'autres batteries pourraient endommager l'appareil.
6. Ne pas laisser l'appareil en permanence sur la station de charge.
7. Ne pas porter dans un bain.

COMMENT UTILISER MON CLICK NOMADE ?

CLICK NOMADE
NOTICE D'UTILISATION

BALTO
Nomade
par SeniorAdom



NUMÉRO :

CODE :

CONTENU DE LA BOÎTE

- ✓ Un CLICK Nomade 
- ✓ Un collier 
- ✓ Une base de charge 
- ✓ Un câble USB d'alimentation 
- ✓ Une prise secteur 
- ✓ Une notice d'utilisation 

MISE EN ROUTE DU CLICK NOMADE



1. Aller sur l'URL : <https://activate.senioradom.com> pour activer votre CLICK.
2. Suivre les instructions.
3. Après réception du mail d'activation, charger le CLICK pendant 1h.
4. Aller à l'extérieur et marcher avec le CLICK entre 5 à 10 mètres pour la mise à jour du signal. Effectuer un test en déclenchant une alerte (voir page «Déclencher une alerte»)

⚠ Ces 3 étapes sont obligatoires pour garantir le bon fonctionnement du CLICK.

SIGNIFICATION DES BOUTONS



1. Le CLICK vous permet de faire des appels de courtoisie avec vos aidants. Les numéros de téléphone sont paramétrables sur l'espace client sur la page «Personnes».
2. Port USB pour charger directement avec le câble d'alimentation.
3. Envoyer une alerte.

CHARGER LE CLICK NOMADE

La lumière **bleue** sur le CLICK clignote rapidement pour signaler au bénéficiaire que la batterie est basse.



1. Brancher le câble USB sur l'alimentation.
2. Brancher l'autre extrémité du câble à l'arrière de la base.
3. Enfoncer le CLICK jusqu'à vibration sur la base. Une lumière **rouge** sur le devant vous indique qu'il est en charge.

Durée de charge : 1 à 2H.

Autonomie : 2 à 7 jours.

⚠ Les aidants recevant les alertes préventives seront prévenus par SMS ou email lorsque la batterie descend à 25% lorsqu'elle remonte à 40% (sous condition de réseau). Le niveau de batterie est également disponible sur l'espace client.

DÉCLENCHER UNE ALERTE



1. Appuyer sur le bouton SOS jusqu'à ce que vous entendiez un «bip» (environ 2 secondes).
2. L'alerte est envoyée en cascade selon l'option d'appels choisie (plateau de téléassistance ou aidants).
3. Vous êtes rappelé sur le CLICK dans un court délai. Le CLICK décroche automatiquement, vous n'avez rien à appuyer.

APPELER LE CLICK NOMADE



Vous pouvez être contacté grâce au numéro de téléphone situé sur la 1^{ère} page.

Si la personne qui vous appelle fait partie de vos aidants, elle sera directement mise en relation avec votre CLICK. Dans le cas contraire, elle devra composer le code à 4 chiffres situé également sur la 1^{ère} page.

Il est également possible d'appeler le CLICK via l'espace client sur la page
Pour raccrocher : appuyer sur le bouton SOS ou attendre que l'appelant raccroche.