



## INDICATIONS

Prise en charge des plaies aiguës et chroniques ne pouvant cicatriser que par deuxième intention, superficielles à profondes, bourgeonnantes, modérément à faiblement exsudatives telles que les :

- déchirures cutanées,
- plaies chirurgicales,
- brûlures du premier et deuxième degré,
- sites donneurs de greffe,
- escarres,
- ulcères de jambe,
- ulcères du pied diabétique,
- plaies infectées,
- plaies malignes,
- ulcères fongueux.

**ALLEVYN Gentle Border Lite** n'est pas indiqué pour la région sacrée.

**ALLEVYN Gentle Border Lite** convient pour une utilisation sur une peau fragile.

## DESCRIPTION

Le pansement **ALLEVYN Gentle Border Lite** possède une technologie avancée en trois couches qui associe une mousse hydrocellulaire absorbante placée entre une interface adhésive de gel de silicone perforée, en contact avec la plaie et un film externe hautement perméable et étanche à l'eau. Le film protecteur contribue à la prévention de la contamination bactérienne de la plaie et la protège des liquides.

La technologie avancée en trois couches des pansements **ALLEVYN Gentle Border Lite** facilite la gestion dynamique de l'exsudat pour offrir un environnement humide optimal au contact de la plaie favorisant une cicatrisation plus rapide et qui peut aider à réduire le risque de macération.

L'interface des pansements **ALLEVYN Gentle Border Lite** en contact avec la plaie est recouverte d'une couche adhésive douce en silicone qui garantit un retrait non douloureux lors des changements de pansements.

**ALLEVYN Gentle Border Lite** peut être retiré et remplacé sans perdre ses propriétés adhésives. **ALLEVYN Gentle Border Lite** peut rester en place sans nécessiter de fixation secondaire; il est facile à appliquer et à retirer.

**ALLEVYN Gentle Border Lite** peut être utilisé en association avec **INTRASITE<sup>®</sup> Gel** pour des plaies nécrosées ou des escarres.

## COMPOSITION DU PRODUIT

### Absence de latex, colophane et Di (2-ethylhexyl) phtalate (DEHP) :

- Couche supérieure : film de polyuréthane avec adhésif acrylique, rose (film OPSITE<sup>®</sup> hautement perméable).
- Couche centrale : mousse de polyuréthane absorbante.
- Couche inférieure : interface composée de 3 composants : un adhésif acrylique, un film de polyuréthane et un adhésif de silicone.

## CONDITIONNEMENT

### CONDITIONNEMENT PRIMAIRE :

#### Absence de latex et métaux lourds.

Le pansement est conditionné dans un sachet individuel thermosoudé pelable.

Dessus du sachet : papier laqué quadrillé.

Dessous du sachet : papier enduit de polyéthylène basse densité.

### CONDITIONNEMENT SECONDAIRE :

Carton recyclable.

## CONTRE-INDICATION

Aucune.

## PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Usage unique.
- Ne pas utiliser les pansements **ALLEVYN Gentle Border Lite** en même temps que des agents oxydants tels que les solutions d'hypochlorite de sodium (ex: DAKIN) ou du peroxyde d'hydrogène (eau oxygénée) car ces produits peuvent détériorer le composant absorbant en polyuréthane du pansement.
- Ne plus utiliser si des rougeurs ou une sensibilisation apparaissent et consulter un médecin.
- Ne pas utiliser si le sachet individuel protecteur est ouvert ou endommagé (perte de la garantie de stérilité).
- **ALLEVYN Gentle Border Lite** est un produit à usage unique. L'utilisation chez plus d'un patient peut entraîner une contamination croisée ou une infection. L'ouverture du sachet contenant le pansement compromet la barrière stérile aussi tout pansement non utilisé ne doit pas être gardé pour une application ultérieure.

## MODE D'EMPLOI

1. Nettoyer la plaie selon le protocole habituel.
2. Choisir un pansement de taille adaptée
3. Préparer et nettoyer la peau périlésionnelle en enlevant tout excès d'humidité. Eliminer l'excédent de pilosité afin que le pansement soit bien en contact avec la plaie.
4. Commencer par enlever le film protecteur d'**ALLEVYN Gentle Border Lite** et fixer le côté adhésif du pansement sur la peau.
5. Lisser le pansement sur la plaie en retirant le reste du film protecteur et s'assurer que le pansement adhère bien tout autour de la plaie.
6. **ALLEVYN Gentle Border Lite** peut être découpé de façon à s'adapter à des plaies sur le talon, les coudes et toute autre localisation difficile (à l'exception de la région sacrée). Toujours utiliser une technique aseptique pour découper le pansement. S'assurer que toutes les zones en contact avec la mousse hydrocellulaire sont recouvertes par un film approprié en prenant soin de ne pas recouvrir complètement le pansement.

# ALLEVYN<sup>®</sup> GENTLE BORDER LITE

## Pansement hydrocellulaire adhésif avec gel siliconé

### FREQUENCE DE CHANGEMENT

Durant les premières phases de prise en charge de la plaie, les pansements **ALLEVYN Gentle Border Lite** devront être fréquemment inspectés. Lorsque le produit est utilisé sur des plaies infectées, l'infection devra être contrôlée et traitée conformément au protocole clinique local en vigueur. Les pansements peuvent être laissés en place jusqu'à 7 jours, suivant l'état de la plaie et de la peau périlésionnelle ou jusqu'à ce que l'exsudat soit visible et qu'il soit à moins de 1,5 cm du bord du pansement. Il convient aussi de prendre en considération les protocoles locaux en vigueur.

### RETRAIT DU PANSEMENT

Pour retirer le pansement **ALLEVYN Gentle Border Lite**, soulever l'un des coins et le tirer doucement en un mouvement parallèle à la peau jusqu'à ce qu'il soit complètement retiré de la plaie.

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

**Découpable :** OUI  NON

**Spécifications du produit fini :**

- Capacité d'absorption totale : minimum 30 g / 100 cm<sup>2</sup> / 24 heures (selon norme EN 13726-1).
- Capacité de gestion des liquides (24 heures / 35 ml de liquide)
  - Absorption : minimum 30 g / 100cm<sup>2</sup>.
- Perméabilité à la vapeur d'eau : 1000-3500 g / m<sup>2</sup> / 24 heures.

**Stérilisation :** Oxyde d'éthylène.  
(conformément aux exigences des normes EN 556 et EN ISO 11135)

**Durée de vie et conditions de stockage :** 24 mois à l'abri de l'humidité et de la lumière du soleil, à une température n'excédant pas 25°C.

**Procédé de destruction :** Suivre la procédure d'élimination des déchets en vigueur dans l'établissement.

### PRESENTATIONS COMMERCIALES

#### Hôpital :

Code produit	Dimensions	Taille de la mousse (cm)	Surface totale du pansement	Unité de commande	Carton standard
66800834	7,5cm x 7,5cm (carré)	5 x 5	56,25 cm <sup>2</sup>	Boîte de 10 pansements	6 boîtes
66800835	10cm x 10cm (carré)	7,5 x 7,5	100 cm <sup>2</sup>	Boîte de 10 pansements	6 boîtes
66800840	15cm x 15cm (carré)	12,5 x 12,5	225 cm <sup>2</sup>	Boîte de 10 pansements	6 boîtes
66800836	5,5cm x 12cm (rectangulaire)	3 x 9,5	66 cm <sup>2</sup>	Boîte de 10 pansements	6 boîtes
66800837	8cm x 15cm (rectangulaire)	5,5 x 12,5	120 cm <sup>2</sup>	Boîte de 10 pansements	6 boîtes
66801012	10cm x 20cm (rectangulaire)	7,2 x 17,2	200 cm <sup>2</sup>	Boîte de 10 pansements	6 boîtes

#### Produit disponible sous le nom de ALLEVYN Gentle Border Lite Ovals

66801013	8,6cm x 7,7cm (oval)	6,1 x 4,8	52 cm <sup>2</sup>	Boîte de 10 pansements	6 boîtes
----------	----------------------	-----------	--------------------	------------------------	----------

#### Produit disponible sous le nom de ALLEVYN Gentle Border Lite OvalM

66801014	13,1cm x 15,2cm (oval)	9,6 x 10,9	156,38 cm <sup>2</sup>	Boîte de 10 pansements	6 boîtes
----------	------------------------	------------	------------------------	------------------------	----------

**ALLEVYN<sup>®</sup> GENTLE BORDER LITE****Pansement hydrocellulaire adhésif  
avec gel siliconé****Produit disponible sous le nom de ALLEVYN Gentle Border Lite Multisite**

66801041	8cm x 8,4cm	5,4 x 5,8	47 cm <sup>2</sup>	Boîte de 10 pansements	6 boîtes
----------	-------------	-----------	--------------------	------------------------	----------

**Ville :**

Code produit	Dimensions	Taille de la compresse (cm)	Surface totale du pansement	Code ACL 13	Code LPP*	Tarif LPP* TTC	Unité de commande
66800841	8cm x 8cm (carré)	5 x 5	64 cm <sup>2</sup>	3401097991634	1321982	14,49 €	Boîte de 10 pansements
66800835	10cm x 10cm (carré)	7,5 x 7,5	100 cm <sup>2</sup>	3401097991924	1356319	22,52 €	Boîte de 10 pansements
66800840	15cm x 15cm (carré)	12,5 x 12,5	225 cm <sup>2</sup>	3401097991405	1388153	48,94 €	Boîte de 10 pansements
66800836	5,5cm x 12 cm (rectangulaire)	3 x 9,5	66 cm <sup>2</sup>	3401097991573	1321982	14,49 €	Boîte de 10 pansements
66800837	8cm x 15cm (rectangulaire)	5,5 x 12,5	120 cm <sup>2</sup>	3401097991863	1322326	26,86 €	Boîte de 10 pansements
66801012	10cm x 20cm (rectangulaire)	7,2 x 17,2	200 cm <sup>2</sup>	3401021339815	1307700	43,58 €	Boîte de 10 pansements

**Produit disponible sous le nom de ALLEVYN Gentle Border Lite OvalS**

66801013	8,6cm x 7,7cm (oval)	6,1 x 4,8	52 cm <sup>2</sup>	3401021339754	1318030	11,67 €	Boîte de 10 pansements
----------	----------------------	-----------	--------------------	---------------	---------	---------	------------------------

**Produit disponible sous le nom de ALLEVYN Gentle Border Lite OvalM**

66801014	13,1cm x 15,2cm (oval)	9,6 x 10,9	156,38 cm <sup>2</sup>	3401021339983	1338942	34,17 €	Boîte de 10 pansements
----------	------------------------	------------	------------------------	---------------	---------	---------	------------------------

\*Liste des Produits et Prestations Remboursables prévue à l'article L.165-1 du code de la Sécurité Sociale.

Prise en charge des pansements hydrocellulaires pour plaies aiguës sans distinction de phase, plaies chroniques en phase de bourgeonnement en traitement séquentiel.

**Produit disponible sous le nom de ALLEVYN Gentle Border Lite Multisite**

66801041	8cm x 8,4cm	5,4 x 5,8	47 cm <sup>2</sup>	3401051101185	1303961*	Boîte de 10 pansements
----------	-------------	-----------	--------------------	---------------	----------	------------------------

\*Arrêté du 8 juillet 2016 portant modification des conditions d'inscription des pansements dits anatomiques et relatif au pansement URGOSTART au titre Ier de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale.

Code LPP	Nomenclature	Tarif LPP* TTC
1303961*	Pansement anatomique absorp moy, adh, 47 cm <sup>2</sup> , SMITH, ALLEVYN GBLM, B/10. Pansement adhésif (adh) anatomique hydrocellulaire à absorption moyenne, ALLEVYN GENTLE BORDER LITE MULTISITE (GBLM) en taille 47,1 cm <sup>2</sup> en boîte de 10 pansements. MODALITÉS DE PRISE EN CHARGE : La surface exacte du pansement doit figurer sur la boîte de pansements. RÉFÉRENCE PRISE EN CHARGE : 66801041 (8 cm x 8,4 cm) Date de fin de prise en charge : 1er septembre 2025.	12,11 €

**ALLEVYN<sup>®</sup> GENTLE BORDER LITE**  
**Pansement hydrocellulaire adhésif**  
**avec gel siliconé**

**INFORMATIONS TECHNICO-REGLEMENTAIRES**

<b>Classe du dispositif médical :</b> (Dir. 93/42/CEE-annexe IX)	IIb – Règle 4
<b>Marquage CE :</b>	Certificat n°CE 00356
<b>Code CLADIMED :</b>	F51BB01
<b>Code GMDN :</b>	44970
<b>Organisme notifié :</b>	British Standards Institution (BSI) – n°0086
<b>Etiquetage :</b>	Conforme à l'annexe I de la directive 93/42/CEE
<b>Fabricant :</b>	Smith & Nephew Medical Limited - Hull HU3 2BN – Angleterre Certifications ISO 9001, ISO 13485 et ISO 14001 ou Fabriqué en Chine pour Smith & Nephew Medical Limited - Hull HU3 2BN – Angleterre Certifications ISO 9001, ISO 13485 et ISO 14001
<b>Distributeur :</b>	Smith & Nephew S.A.S. 92200 Neuilly sur Seine Certification ISO 9001
<b>Contrôles du produit fini :</b>	<b>Produit fini :</b> - Stérilité - Intégrité du sachet
<b>Sécurité biologique :</b>	Conforme à la norme EN ISO 10993 : Evaluation biologique des dispositifs médicaux.