

## CÂBLES actiTENS

### ⇒ PRESENTATION

Les câbles sont indispensables pour pouvoir utiliser le **dispositif de neurostimulation électrique actiTENS**. Ce dispositif a été élaboré par une équipe d'ingénieurs et avec l'expertise d'un spécialiste du traitement de la douleur. Il vise à soulager les **douleurs chroniques** chez l'adulte par le biais d'**impulsions électriques** dirigées sur les fibres musculaires et nerveuses qui agissent directement sur le message neuronal émis par le cerveau en le brouillant et, ainsi, en atténuant considérablement les douleurs associées.

Les **câbles actiTENS** permettent de **raccorder les électrodes** placées sur la zone douloureuse du corps au stimulateur positionné au plus près grâce au support adhésif ou à un brassard. Ils sont dotés de deux embouts de tailles différentes : l'embout épais se fixe sur le stimulateur tandis que l'embout fin doit être placé sur l'électrode. Pour offrir plus de confort lors des séances de stimulation et garantir la liberté de mouvement, **trois longueurs** de câbles sont disponibles.

**ActiTENS** est un dispositif médical disposant de la certification ISO 13485 et du marquage CE. Il se pilote avec l'application mobile actiTENS, qui propose de nombreux programmes pré-enregistrés pour réaliser des séances de neurostimulation à n'importe quel moment de la journée.

#### Trois longueurs disponibles :

- 14 cm
- 40 cm
- 100 cm

### ⇒ CONSEILS D'UTILISATION

Placer les embouts fins des câbles sur les électrodes avant de les positionner sur la zone douloureuse. Raccorder ensuite les embouts épais au stimulateur actiTENS. Placer les électrodes et mettre en fonction le stimulateur. Depuis l'application, sélectionner le programme souhaité et lancer la séance de stimulation. Lorsque celle-ci est terminée, déconnecter le stimulateur, retirer les électrodes et débrancher les câbles pour les ranger dans leur sachet.

Nettoyer les câbles après chaque utilisation en utilisant un tissu humide et un nettoyant doux. Ne pas immerger dans la solution de nettoyage. Ne pas utiliser d'accessoires de nettoyage automatique.