

## Manche en acier inoxydable "STANDARD" Swann-Morton



N° / Référence - embout étroit type 3	
M3IG longueur 12 cm Réf. 0933	M3LI longueur 21 cm Réf. 0913
M7I longueur 16 cm Réf. 0907	M9I longueur 11,5 cm Réf. 0909

N° / Référence - embout étroit type 4	
M4IG longueur 13 cm Réf. 0934	M4LI longueur 21 cm Réf. 0914

Produit	Manche "STANDARD" en acier inoxydable
Unité de vente	Le manche emballé dans un sachet hermétique en polyéthylène
Conditionnement usine	Boite de 10 unités
Stérilisation	Produit non stérile
Matériau	Manche en acier inoxydable 17-4ph
Composition emballage	Etui individuel
Compatibilité	<p>Manche à embout étroit type 3 :</p> <p>Taille de lame adaptée en gamme Standards : n°6 à 16</p> <p>Taille de lame adaptée en gamme Spéciales : n°40 – E/11 – lame LSTC – lame SG3</p> <p>Manche à embout étroit type 4 :</p> <p>Taille de lame adaptée en gamme Standards : n°18 à 27</p> <p>Taille de lame adaptée en gamme Spéciales : n°36</p>
Maintenance	<p>Les manches résistent à la stérilisation à l'autoclave à 134°C pendant 30 mn.</p> <p>Ils sont lavables en machines standard ou à ultrasons, trempables dans un bain décontaminant, résistants à un bain de soude à 20°C pendant 1 heure, stérilisables en chaleur sèche ou humide. Au lavage, à disposer avec l'embout en l'air pour éviter d'abîmer la zone de fixation de la lame.</p>
Directive	Classe I
Normes	Marquage CE - Produit fabriqué par l'usine Swann-MortonLtd à Sheffield
Marquage	<p>Etiquetage : code GS1 conforme à l'UDI enregistré sous le numéro 503395500004 – Code Barre avec indication de la référence, du N° de lot et de la date de péremption.</p> <p>Gravures : Swann-Morton, numéro du manche suivi d'un code de fabrication à 3 ou 4 chiffres selon le modèle court ou long : <i>exemple : modèle court 3204 / modèle long 819</i></p> <p>Le premier chiffre «3» ou «8» correspond au Nème cycle de fabrication de l'année (interne usine)</p> <p>Les deux chiffres suivants «20» ou «19» correspond à l'année de fabrication : ici 2020 ou 2019</p> <p>Le dernier chiffre si il y a, «4» correspond au numéro de la machine de fabrication de l'usine</p>
Conservation	Environnement propre et sec
Péremption	10 ans à partir de la date de fabrication, indiquée sur les emballages
Elimination	Le produit doit être éliminé dans un conteneur adapté et/ou par incinération.
Contact	Swann-Morton/Sinner - ZA du Verdalaï - 13790 Peynier - 04 42 29 08 08 - services@swann-morton-sinner.com

## CONDITIONNEMENT DU PRODUIT

**Manche en acier inoxydable « STANDARD »**

### 1-Produit



### 2-Emballage primaire : individuel pour chaque produit

Conforme CE



Coordonnées fabricant

**LOT** numéro de lot

Produit non stérile



 numéro de lot

Acier Inoxydable

**REF** Référence produit



### 3-Emballage secondaire - boîte de 10

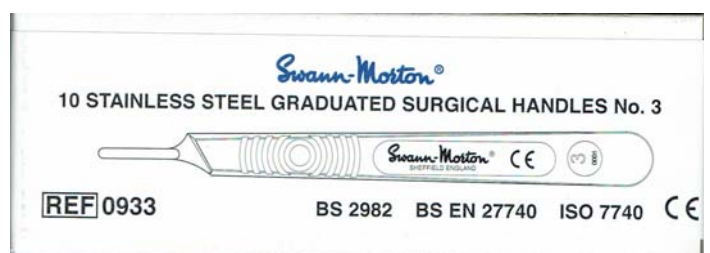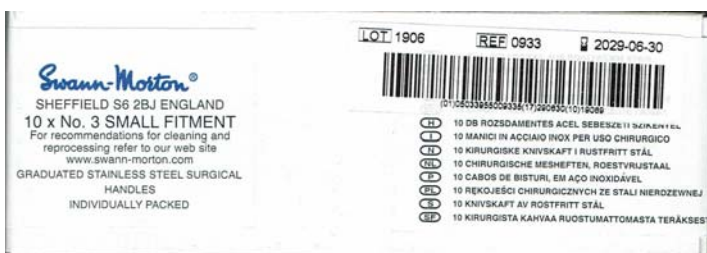

## Classification et codes produits

CODE USINE	REF ARTICLE	DESIGNATION	Classe	Dispositifs Médicaux	Marquage CE	CODE GMDN	CODE CLADIMED	NOMENCLATURE DOUANIERE	CODE UDI
0933	M3IG	MANCHE court n°3 standard gradué	I	-	CE	12235	-	90189084	5033955009335
0934	M4IG	MANCHE court n°4 standard gradué	I	-	CE	12235	-	90189084	5033955009342
0907	M7I	MANCHE n°7	I	-	CE	12235	-	90189084	5033955009076
0909	M9I	MANCHE n°9	I	-	CE	12235	-	90189084	5033955009090
0913	M3LI	MANCHE long n°3 standard	I	-	CE	12235	-	90189084	5033955009137
0914	M4LI	MANCHE long n°4 standard	I	-	CE	12235	-	90189084	5033955009144