

Stimulateur circulatoire Pressothérapie – BASIC

Réf. 001-1009-10

Le stimulateur circulaire **VenenWalker** soulage en utilisation à domicile les gonflements, lourdeurs et douleurs dans les jambes.

Utilisable via un adaptateur secteur ou sur piles alcaline pour un usage autonome.

Déposé à :
ansm
Agence nationale de sécurité
des médicaments et des produits
de santé



- ❖ Décongestionne les **mollets** et **chevilles**
- ❖ Soulage les **tensions** et les **blessures** sportives
- ❖ Améliore les problèmes **esthétiques** et prévient les problèmes **veineux**.
- ❖ Améliore la **circulation sanguine**.
- ❖ Favorise la guérison des **ulcères de mollet**.
- ❖ Utilise la technique de **compression pneumatique** intermittente pour améliorer le **reflux veineux**.
- ❖ Dispositif de massage relaxant qui aide au **relâchement musculaire**.
- ❖ Efficace et confortable:
 - Coussins d'air à **double paroi** avec pieds et voûtes plantaires intégrés
 - Réglage de la **puissance** de la pression
 - 2 à 3 séances par semaine sont suffisantes, agit de façon très efficace dès la **première utilisation**.
- ❖ Adapté aux patients **âgés** ou en **surpoids**.
- ❖ Massage **doux** et **sans douleur** du mollet
- ❖ Produit conçu en **Allemagne**.
- ❖ Petit, simple d'utilisation et surtout facilement transportable avec son **sac de rangement** inclus.
- ❖ Fonctionne sous secteur via un adaptateur électrique ou avec 4 piles alcalines AA.

▶ Simule la **circulation sanguine** en utilisant la technique de **massage par compression** .

▶ Les mollets sont massés par des **coussins d'air** qui gonflent et se dégonflent en alternance de **manière rythmique**.

▶ Une durée d'application quotidienne de **20 à 30 minutes** est suffisante.

▶ Avec son **design compact** et le **sac de transport** fourni, celui-ci permet une application confortable à **domicile** ou **en déplacement**.

Maux traités par VenenWalker BASIC

- | | | |
|--|--|--|
| o Ulcères au mollet liés au problème de retour veineux | o Ecchymoses | o Hématome suite à une blessure. |
| o Fourmillement | o Soulage les jambes lourdes et fatiguées | o Favorise la récupération après un traumatisme (opération, effort physique, coups...) |
| o Contusions et enflures | o Congestion veineuse | o Lipodome |
| o Engourdissement et courbatures | o Légers troubles de la circulation artérielle | |
| | o Varices et varicosités | |

Retrouvez plus d'informations sur l'appareil VenenWalker Basic sur: www.venenwalker.fr



L'appareil de pressothérapie VenenWalker Basic est un appareil entièrement automatisé, destiné à une utilisation à domicile par des particuliers ou professionnels de santé. Il comprime les jambes grâce à une technique de compression pneumatique intermittente. Classé IIa, ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE 0123. Il est dangereux d'effectuer un autodiagnostic et de mettre en place un traitement sur la seule base des résultats d'auto-mesures, sans consulter un médecin, un pharmacien ou un professionnel de santé. Se référer à la notice d'utilisation pour davantage d'informations sur les mises en garde concernant l'utilisation du VenenWalker Basic.
Mandataire européen : GlobalMind Consumer Electronics GmbH Ernst – Mantius – STR. 11 D-21029, Hamburg, Allemagne, pour davantage d'informations sur le fabricant et l'importateur, consulter la notice d'utilisation.



Informations commerciales – Pack Stimulateur circulatoire Pressothérapie version Basic – réf. 001-1009-10			
Données master carton	Poids: 10.0 kg Dimensions: 40.5 x 31 x 45 cm Pcs / boîte: 6	Données produit Boitier de commande	Dimensions: 20 x 8.5 x 4.5 cm Poids : 360 g
Données packaging	Dimensions: 29,5 x 14,5 x 19,5 cm Poids: 1.7 Kg	Données produit jambière	Poids : 250 g
Code EAN Code HS DEEE Ecologic Basic UDI	4059266109015 90191010000 MMEDI010000 : 0.13 € HT B-VWB-GMTU	Données produit Sac de transport	Dimensions : 30 x 10 x 15 cm Poids : 180 g

Informations techniques – Pack Stimulateur circulatoire Pressothérapie version Basic – réf. 001-1009-10			
Jambières	Longueur: 41 cm Circonférence : 50 cm Matériaux: nylon Pression: 120 mm Hg maximum	Données électriques Boitier de commande	Tension: jusqu'à 240 volt Fréquence: 50 Hz Intensité: 0.1 A Adaptateur: long. Fil 1,8m sortie 6V=1A
Certification	CE 93/42 valide jusqu'au 26/05/2024, en phase avec le règlement 2023/607 relatif aux dispositions transitoires vers la réglementation MDR 2017/745 Organisme certificateur TUV Süd (CE0123)		

Contre-indications à l'utilisation de « BASIC »

- Insuffisance cardiaque congestive
- Thrombophlébite généralisée, thrombose ou soupçon de thrombose
- Œdèmes pulmonaires
- Hypertension
- Inflammations aiguës
- Plaies ouvertes
- Tumeurs malines
- Maladie artérielle à un stade avancé

Si vous n'êtes pas certain de souffrir ou non de l'une des maladies décrites ci-dessus, consultez un médecin avant d'utiliser de pack de pressothérapie BASIC.

Retrouvez plus d'informations sur l'appareil VenenWalker Basic sur: www.venenwalker.fr

L'appareil de pressothérapie VenenWalker Basic est un appareil entièrement automatisé, destiné à une utilisation à domicile par des particuliers ou professionnels de santé. Il comprime les jambes grâce à une technique de compression pneumatique intermittente. Classé IIa, ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE 0123. Il est dangereux d'effectuer un autodiagnostic et de mettre en place un traitement sur la seule base des résultats d'auto-mesures, sans consulter un médecin, un pharmacien ou un professionnel de santé. Se référer à la notice d'utilisation pour davantage d'informations sur les mises en garde concernant l'utilisation du VenenWalker Basic.

Mandataire européen : GlobalMind Consumer Electronics GmbH Ernst – Mantius – STR. 11 D-21029, Hamburg, Allemagne, pour davantage d'informations sur le fabricant et l'importateur, consulter la notice d'utilisation.