



AIDES À LA POSTURE

Les dispositifs d'**aides techniques à la posture** sont des dispositifs médicaux qui ont été mis au point pour les patients atteints de handicaps multiples, en position couchée, pour assurer la mise en œuvre simple et rapide d'une aide au positionnement.







DISPOSITIF TECHNIQUE AIDE À LA POSTURE

? Pourquoi ?

- Aider à la prévention ou au traitement d'une escarre
- Assurer un maintien postural
- Corriger des postures vicieuses
- Améliorer le confort et bien être
- Faciliter les soins prodigués par les soignants et aidants



Pour qui ?

- Personnes alitées en perte d'autonomie locomotrice
- Population avec troubles neurologiques, handicaps physiques, conditions médicales qui affectent la mobilité/ intégrité fonctionnelle ou structurelle

Doit s'intégrer dans une approche de prise en charge holistique en combinant :



Lit
médical



Matelas
thérapeutique



Quand ?

Changements de position :

- **Toutes les 3 heures**
avec un matelas statique de type gaufrier
- **Toutes les 4 heures**
avec un matelas statique en mousse viscoélastique ou multistrates
- **Toutes les 8 heures**
avec un (sur)matelas à air motorisé à pression constante ou alternée ou mixte ou à perte d'air



Découvrez la **nouvelle** gamme de coussins de positionnement


By WIN  CARE



POZ 'IN' FORM **plus**



CAREWAVE **plus**

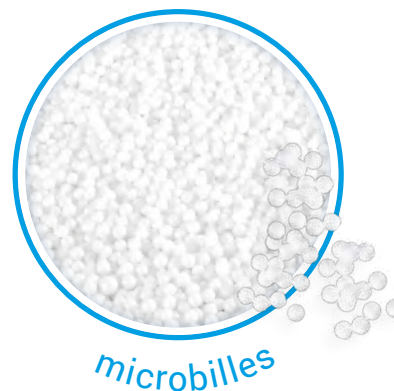



AIDES À LA POSTURE

DISPOSITIF TECHNIQUE AIDE À LA POSTURE



Le saviez -vous ?

Il existe un déficit d'accès aux coussins de positionnement

70%

des EHPAD
ne sont pas équipés
de coussins
de positionnement

25%

Seulement
des patients éligibles
ont des coussins
de positionnement

➤ Selon les soignants interrogés il y'a un manque de maîtrise et de connaissances autour des dispositifs d'aide à la posture

Je **ne sais pas**
comment les utiliser
et j'ai peur de mal faire mal

Je ne **m'y retrouve pas**
entre les formes
et les dénominations
de chaque marque



Pour quel patient ?
Et **comment choisir**
le DATP adéquat parmi
toutes ces formes ?

C'est **compliqué** à prescrire
je suis perdue

Parce que les escarres sont **l'affaire de tous** et qu'une immobilisation prolongée entraîne des complications...
Winncare s'engage en vous proposant une nouvelle gamme de coussins de positionnement **unique & innovante** :



Co-développée
avec des **soignants**



Pensée pour répondre
à chaque besoin **patient**



Dans l'objectif
de rendre le positionnement

PLUS Compréhensible pour les soignants

PLUS Efficace pour les patients



Une **nouvelle** gamme **PLUS complète** adaptée à chaque besoin patient et chaque environnement de soin

2 types de technologies disponibles à choisir selon le profil patient

POZ 'IN' FORM **PLUS**



microfibres


Pour **POSITIONNER**



Mobilité
réduite

> **CONFORT**

CAREWAVE **PLUS**

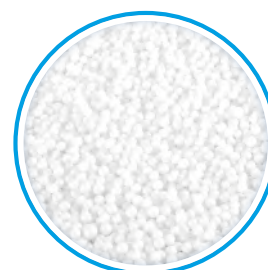

microbilles

Pour **POSTURER**



Peu de mobilité
à immobile

> **SOIN**

17 formes soigneusement pensées pour couvrir tous les besoins

Coussins **STANDARD**



Coussins **BASE**



Coussins **PLOT(s)**



Coussin décharge occipitale



Un choix de housses parmi 3 textiles alliant confort, hygiène & technicité pour répondre aux besoins des différents environnements de soin

Housse Standard



Polyuréthane haute densité

> Facile à nettoyer



Tous nos textiles sont Certifiés **OEKO-TEX** classe 1- la plus stricte, sans substances nocives, adaptés aux peaux les plus sensibles

Housse Confort



Fibres de cellulose 100% naturelles

> Sensation de confort et accueil cocooning



Housse Hygiène




Polyuréthane traité aux ions argent avec soudures aux ultrasons

> Usage **multi patients sécurisé** et **facilité**

Une housse technique & Innovante !



- ▶ Traitement aux ions argent Ag+, efficace contre le développement des micro-organismes
- ▶ Soudure aux ultrasons, limite la pénétration des liquides
- ▶ Technologie **Memory Touch™** pour une répartition stable et durable des billes

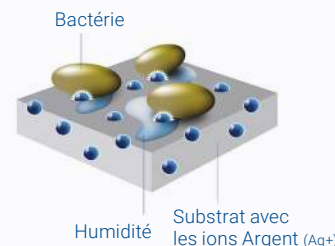

Housses dotées de rabats recouvrants les fermetures éclair pour une étanchéité et une durabilité améliorée

Coussins de série de positionnement, **STANDARD**, des hanches et des genoux. Pour patients polyhandicapés en position allongée.

 **Prescrit seul**

 **173,79€ sans PLV**
- CODE 6229732 -

Coussin **STANDARD** de positionnement lateral 30° N°09 & N°10



CAREWAVE **plus**

POZ 'IN 'FORM **plus**



Scan me !



Coussin N°09



Coussin N°10

Dimensions :

Coussin N°09 : 180 cm x 55 cm x 15 cm

Coussin N°10 : 170 cm x 55 cm x 15 cm

Coussin de positionnement polyvalent permettant des applications diverses :

- ▶ Placé face postérieure du patient en semi-latéral 30°, permet de décharger la pression des régions suivantes : trochantérienne, sacrum, talons, rachis internes et malléoles internes
- ▶ Placé en semi-ventral, permet de libérer les pressions sur les parties basses des poumons et obtenir un bon dégagement des voies supérieures respiratoires
- ▶ Placé sous les mollets, permet de réaliser une décharge localisée au niveau des talons
- ▶ Placé sous les cuisses permet de soulager les tensions tendino-musculaires au niveau lombaire et réaliser un relâchement de la sangle musculaire abdominale

Coussin **STANDARD** demi-lune N°11



CAREWAVE **plus**

POZ 'IN 'FORM **plus**



Scan me !



Dimension : 130 cm x 80 cm x 20 cm

Coussin de positionnement polyvalent permettant des applications diverses :

- ▶ Placé derrière le buste du patient, permet de réaliser une position semi assise confortable avec buste relevé
- ▶ Placé sous les mollets, permet de réaliser une décharge de pression localisée au niveau des talons
- ▶ Placé sous les cuisses, permet de soulager les tensions tendino-musculaires au niveau lombaire et un relâchement de la sangle musculaire abdominale
- ▶ Associé à un coussin modulaire cylindrique N°06 ou un coussin modulaire triangulaire type N°12 placé(s) sous le creux des genoux, permet de réaliser une position semi fowler

Coussin **STANDARD** semi fowler N°14



CAREWAVE **plus**

POZ 'IN 'FORM **plus**



Scan me !



Dimension : 70 cm x 50 cm x 10 cm

Coussin de positionnement pour position semi assise

- ▶ Placé derrière le buste, permet le maintien bilatéral du buste
- ▶ Associé à un coussin modulaire triangulaire N°12 ou un coussin modulaire cylindrique N°06 placé sous le creux des genoux, permet :
 - La réduction de la pression sur le diaphragme facilitant la respiration et à l'oxygénation
 - La réduction de la pression de contact au niveau du dos et des fesses
 - La prévention des reflux gastro-œsophagiens

Coussin **STANDARD** abduction des hanches N°17



CAREWAVE **plus**

POZ 'IN 'FORM **plus**



Scan me !



Dimension : 35 cm x 28 cm

Coussin de positionnement polyvalent à placer entre les jambes, permet :

- ▶ Un maintien des hanches en abduction
- ▶ De limiter des phénomènes de frictions et de cisaillements entre les cuisses et genoux

Coussins de série de positionnement, **MODULAIRE**, des hanches et des genoux, **BASE**. Pour patients polyhandicapés en position allongée.



129,58€ sans PLV
- CODE 6229749 -

 **Prescrit en association avec 1 à 4 plot(s)**

Coussin **MODULAIRE** Universel N°01 & N°02



CAREWAVE **plur**

POZ 'IN' FORM **plur**



Scan me !



Coussin N°01

Coussin N°02

Dimensions :

Coussin N°01 : 45 x 30 x 10 cm

Coussin N°02 : 55 x 40 x 12 cm

Coussins de positionnement polyvalent à placer au niveau des membres inférieurs et/ou supérieurs, et selon le morphotype du patient, permettant de :

- Créer des décharges de pressions localisées au niveau des points d'appuis
- D'assurer un maintien du positionnement dans la durée
- Réaliser la protection des points de contact et une réduction des phénomènes de frictions entre les malléoles, genoux, talons

Coussin **MODULAIRE** Cylindrique N°06



CAREWAVE **plur**

POZ 'IN' FORM **plur**



Scan me !



Dimension : 60 x D20 cm

Coussin de positionnement polyvalent permettant des applications diverses :

- Placé sous les genoux, permet de réduire les tensions tendino-musculaires au niveau lombaire et obtenir un relâchement de la sangle musculaire abdominale
- Placé sous les mollets, permet de réaliser une décharge localisée des talons
- Associé à un coussin modulaire circulaire **N°04**, permet :
 - Une protection des points de contact et une réduction des phénomènes de frictions entre les genoux
 - Un maintien des membres inférieurs en abduction

Coussin **MODULAIRE** Triangulaire N°12



CAREWAVE **plur**

POZ 'IN' FORM **plur**



Scan me !



Dimension : 60 x 30 x 30 cm

Coussin de positionnement polyvalent permettant des applications diverses :

- Placé sous les mollets, permet de réaliser une décharge de pression localisée des talons
- Placé le long du dos et associé à un coussin modulaire cylindrique **N°07** ou universel **N°03** placé entre les genoux, permet un positionnement semi latéral 30°

Coussin **MODULAIRE** Triangulaire N°13



CAREWAVE **plur**

POZ 'IN' FORM **plur**



Scan me !



Dimension : 45 x 25 x 25 cm

Coussin de positionnement polyvalent permettant des applications diverses :

- Placé sous un genou, permet de réduire les tensions tendino- musculaires au niveau lombaire
- Placé sous une cheville, permet de réaliser une décharge de pression localisée genoux

Coussin **MODULAIRE** décharge talonnière N°15



CAREWAVE **plur**

POZ 'IN' FORM **plur**



Scan me !



Dimension : 80 x 20 x D15 cm

Coussin de positionnement pour décharge talonnière, permet de :

- Placé sous les talons, il permet de soulager et décharger la pression au niveau des talons
- Associé à 1 ou 2 coussins **N°07** placés sous le creux du/ des genoux permet de réduire les tensions tendino-musculaires au niveau lombaire

Coussins de série de positionnement, **MODULAIRE**, des hanches et des genoux, **PLOT(s)**. Pour patients polyhandicapés en position allongée.



41,16€ sans PLV
- CODE 6229755 -

Prescrit en association avec 1 base et dans la limite de 4 plot(s)

Coussin **MODULAIRE** Universel N°03



CAREWAVE **plur** POZ 'IN' FORM **plur**



Scan me ! >



Dimension :
45 x 20 x 8 cm


Coussin de positionnement polyvalent à placer au niveau des membres inférieurs et/ou supérieurs, et selon le morpho-type du patient, permet :

- ▶ De créer des décharges de pressions localisées au niveau des points d'appui
- ▶ D'assurer un maintien du positionnement dans la durée
- ▶ De réaliser la protection des points de contact et une réduction des phénomènes de frictions entre les malléoles, genoux, talons

Coussin **MODULAIRE** Circulaire N°04



CAREWAVE **plur** POZ 'IN' FORM **plur**

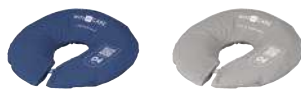

Scan me ! >



Dimension :
50 x 45 x D10 cm

Coussin de positionnement, utilisé en association avec le coussin modulaire cylindrique N°06 chez des patients agités, permet :

- ▶ De réaliser un maintien des hanches en abduction dans la durée
- ▶ De limiter les phénomènes de frictions entre les genoux et protéger les points de contact

Coussin **MODULAIRE** Demi-Circulaire N°05



CAREWAVE **plur** POZ 'IN' FORM **plur**



Scan me ! >



Dimension :
60 x 35 x D10 cm

Coussin de positionnement, utilisé en association avec le coussin modulaire cylindrique N°06 chez des patients agités, permet :

- ▶ De réaliser un maintien des hanches en abduction dans la durée
- ▶ De limiter les phénomènes de frictions entre les genoux et protéger les points de contact

Coussin **MODULAIRE** Cylindrique N°07



CAREWAVE **plur** POZ 'IN' FORM **plur**



Scan me ! >



Dimension :
45 x 25 x 25 cm

Coussin de positionnement polyvalent permettant des applications diverses :

- ▶ Placé entre les malléoles, genoux, talons, permet de réaliser une protection des points de contact et une réduction des phénomènes de frictions

Coussin **MODULAIRE** Déclive N°08



CAREWAVE **plur** POZ 'IN' FORM **plur**



Scan me ! >



Dimension :
40 x 20 x 9 cm

Coussin de positionnement polyvalent permettant des applications diverses :

- ▶ Placé au niveau des membres inférieurs et /ou supérieurs chez un patient non agité, permet :
 - De créer des décharges de pressions localisées
 - D'assurer le calage du patient dans une position choisie

Coussin Décharge Occipitale N°16 *



POZ 'IN' FORM **plur**



Scan me ! >



Dimension :
35 x 28 cm

Coussin de positionnement pour décharge occipitale, placé sous la tête, il permet de réaliser :

- ▶ Un positionnement stabilisé de la tête
- ▶ Le soulagement de la pression au niveau de la zone occipitale
- ▶ Une décharge de l'appui sur l'oreille en position latérale

* Le coussin Décharge Occipitale n'est un PLOT(s). Il n'est pas remboursable



AIDES À
LA POSTURE

DISPOSITIF TECHNIQUE AIDE À LA POSTURE

Une gamme **PLUS responsable**, mettant l'**éco-conception** au cœur de notre démarche d'innovation



Lors de la conception de notre nouvelle gamme, nous avons réfléchi pour minimiser son impact environnemental tout au long de sa durée de vie.



100% de fils de couleur naturel, non teintés, utilisés pour la confection des housses.

Afin d'économiser les ressources en eau, produits chimiques et énergie nécessaire à la coloration




Des emballages recyclables, eux-mêmes issus de **plus de 30% de matériaux recyclés**



Des textiles naturels, de haute qualité, plus durables et plus respectueux de l'environnement.

Certifiés **OEKO-TEX** classe 1 la plus stricte, sans substances nocives, adaptés aux peaux les plus sensibles

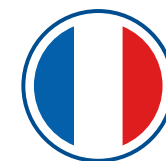

Des produits soigneusement **conçus et fabriqués localement** sur nos sites français, En respectant **des normes rigoureuses en matière d'environnement**



WINNCARE France
4, Le Pas du château, 85670 Saint-Paul-Mont-Penit (France)



Site de production
Minaic-Morvan (35)

Dispositifs médicaux de classe 1



Photos non contractuelles

Une gamme **plus intuitive**

Ajout de :

Numéros associés à chaque forme

- Identification rapide
- Association entre formes facilitées

QR code sur chaque housse pour un accès rapide et simplifié

- Aux informations produits clés
- Aux bonnes pratiques d'utilisation du dispositif
- Aux consignes de prescription



Des outils **simples & intuitifs** pour que le positionnement devienne accessible à tous

- Des **conseils d'utilisation** rapidement accessibles via QR codes
- Des **brochures simples** et compréhensibles par tous
- Des **guides d'aide à la prescription** pour les prescripteurs
- Des **posters** de positions clés
- Des **vidéos** de bonnes pratiques avec des conseils & astuces
- Des formations **e-learning**

Accéder à tous nos outils

Scan me ! ➤



Caractéristiques techniques

Dénomination	Classification	Forme		Taille en cm (LxIxh ou Diam)	Housse		
							
Coussin MODULAIRE universel	BASE			45 x 30 x 10			
	BASE			55 x 40 x 12			
	PLOT			45 x 20 x 8			
Coussin MODULAIRE Circulaire	PLOT			50 x 45 x D10			
Coussin MODULAIRE Demi-circulaire	PLOT			60 x 35 x D10			
Coussin MODULAIRE Cylindrique	BASE			60 x D20			
	PLOT			45 x D12			
Coussin MODULAIRE Déclive	PLOT			40 x 20 x 9			
Coussin STANDARD de positionnement lateral 30°	STANDARD			180 x 55 x 15			
	STANDARD			170 x 55 x 15			
Coussin STANDARD Demi-lune	STANDARD			130 x 80 x 20			
Coussin MODULAIRE Triangulaire	BASE			60 x 30 x 30			
	BASE			45 x 25 x 25			
Coussin STANDARD Semi fowler	STANDARD			70 x 50 x 10			
Coussin MODULAIRE Decharge talonniere	BASE			80 x 20 x D15			-
Coussin Décharge Occipitale	-			50 x 40 x D10			-
Coussin STANDARD Abduction des hanches	STANDARD			35x28			

Références

POZ 'IN' FORM **plus**

Structure des références :
VPOZ[N°Coussin][Housse]


SG (Housse)
Standard Gris
 
CG (Housse)
Confort Gris

Exemple :
Coussin
Triangulaire N°12
Housse
Standard Gris



Référence : VPOZ12SG

CAREWAVE **plus**

Structure des références du coussin avec
les **housses** Standard Bleu et Hygiène Bleu :
VCAR[N°Coussin][Housse]


SB (Housse)
Standard Bleu
 
HB (Housse)
Hygiène Bleu

Exemple :
Coussin
demi-lune N°11
Housse
Standard Bleu



Référence : VCAR11SB

Structure de la référence **sur housse**
Confort Bleu vendue séparément :
VHCAR[N°Coussin]CB


CB (Sur housse)
Confort Bleu

Exemple :
Sur housse
Confort Bleu
pour coussin
demi-lune N°11



Référence : VHCAR11CB

Aide à la prescription des coussins de positionnement



Prescripteurs

Médecins. Ergothérapeutes
sous conditions.

Pour plus d'informations sur l'utilisation
des coussins

Scan me !



	Cas 1	OU	Cas 2
	Les coussins Standards		Les coussins Modulaires (2 types: Base & Plot)
Modalités de prescription	Seul		En association avec + 1 à 4 coussins type plot(s)
Codes LPPr Winncare	Standard 6229732		Base Plot(s) 6229749 6229755
Montant de remboursement LPPr	173,79€ TTC		129,58€ TTC 41,16€ TTC (par plot)
Numéros de formes Winncare ^{1,2,3}	9 Coussin STANDARD de positionnement lateral 30° 10 11 Coussin STANDARD demi-lune 14 Coussin STANDARD semi folwer 17 Coussin STANDARD abduction des hanches		1 Coussin MODULAIRE universel 2 3 Coussin MODULAIRE universel 4 Coussin MODULAIRE circulaire 6 Coussin MODULAIRE cylindrique 12 Coussin MODULAIRE triangulaire 13 5 Coussin MODULAIRE demi-circulaire 7 Coussin MODULAIRE cylindrique 15 Coussin MODULAIRE decharge talonniere 8 Coussin MODULAIRE declive
Fréquence de renouvellement	2 ans		2 ans



Le saviez -vous ?

- Dans les indications d'aide au traitement de l'escarre, **les dispositifs de décharge localisée ou de positionnement** associés aux matelas thérapeutiques sont obligatoires. Le cas échéant, elle peut être associée à l'intervention d'auxiliaires médicaux. (HAS).

axtair automorpho[®]
plus



Exemple ordonnance



Docteur Lorem IPSUM
134 Euphratensis discrevimus
94850 Sarmosata-dictum
Tél: + 31 (0)7 85 02 10 64
lorem-ipsu@lorem-ipsu.fr

Mardi 12 Mai 2024

Mademoiselle Sylvie DUPOND

Braden < 15 ; alité plus de 15h/jour ; levé au moins 1 fois/jour ; escarre de stade 3 au sacrum.

L'état de santé de M ou Mme X nécessite la délivrance de :

1/ Coussin(s) de positionnement des hanches et des genoux, **STANDARD** ou **MODULAIRE base + (N) plot(s)** pour un usage en position allongée.

Code LPP xxx

2/ Surmatelas à air motorisé automatique Axtair Automorpho Plus avec compresseur à la location.

Code LPP 1282740