

# BD™ Chiba


# BD™ Intradiscale

Aiguilles pour prélèvement ou injection

Matériel stérile à usage unique



## FICHE TECHNIQUE

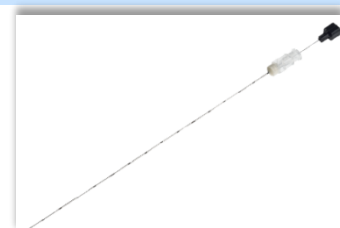

### Description

#### **BD™ Chiba**

L'aiguille BD™ Chiba à paroi mince est une aiguille constituée de 2 éléments (aiguille + mandrin), à utiliser pour :

- Biopsie par aspiration
- Anesthésiologie : bloc sciatique
- Radiologie : Cholangiographie transhépatique, Chimionucléolyse (en combinaison avec une aiguille intradiscale).

#### **BD™ Intradiscale**

Les aiguilles BD™ Intradiscales sont conçues pour la chimionucléolyse du disque L4-L5, utilisables individuellement ou en association avec une aiguille de Chiba.

Dans ce cas, l'aiguille intradiscale sert de guide pour l'aiguille de Chiba dont on recourbe le bout distal sur 2cm pour mieux accéder au niveau du disque intradiscale.

### Caractéristiques Générales

#### • **Aiguilles BD™ Chiba**

Aiguilles à paroi mince avec biseau court (26°) graduée tous les centimètres afin de contrôler la profondeur d'insertion.

#### • **Aiguille BD™ Intradiscale**

Aiguille spinale à biseau de BD™ Quincke. La pointe est incurvée sur 2cm afin d'améliorer l'insertion intradiscale.

#### • **Caractéristiques communes:**

- Aiguille à paroi mince,
- Sans silicone,
- Embase Luer Lock translucide en polypropylène (PP):
- Contrôle et préhension de l'aiguille,
- Chambre de reflux translucide, pour une visualisation précoce.
- Encoche dans l'embase de l'aiguille pour permettre la connexion du mandrin.

### Composition

Composant	Matériau
Canule et Mandrin	Acier inoxydable
Embase de l'aiguille et du Mandrin	Polypropylène (PP)
Fixation de l'aiguille/mandrin sur base	Résine époxy

 Usage unique

 5 ans après stérilisation

## Informations administratives

### **BD™ Chiba**

Marquage CE n°252 333, NSAI 0050 : Classe IIa (Directive européenne 93/42/CEE).

Certification : En ISO 9001 :2008 certificat n°19.2305 certifié par NSAI 0050 pour Becton Dickinson, Juncos, Puerto Rico

### **BD™ Intradiscale**

Marquage CE n°252 333, NSAI 0050 : Classe IIa (Directive européenne 93/42/CEE).

Certification : En ISO 9001 :2008 certificat n°19.2305 certifié par NSAI 0050 pour Becton Dickinson, Juncos, Puerto Rico

Lieu de fabrication / responsable juridique : Becton Dickinson, Juncos, Porto Rico / Becton Dickinson, Franklin Lakes, USA

Stérilisation par oxyde d'éthylène.

Composition : sans latex, sans DEHP ajouté et sans phtalate.

A conserver à température ambiante, sans condensation. Ne pas exposer le produit à l'humidité ou à la lumière directe du soleil

Réf.	Couleur	Gauge	Longueur mm / inch	Diamètre extérieur en mm	Unités par Boîte / Carton / Palettes
<b>Aiguille BD™ Chiba</b>					
408268	Noir	22G	153 / 6	0.70	10 / 50 / 900
408269	Noir	22G	203 / 8	0.70	10 / 50 / 900
<b>Aiguille BD Intradiscale</b>					
408360	Rose	18G	150 / 6	1.25	10 / 50 / 900
405148	Noir	22G	130 / 5	0.70	10 / 50 / 900
405149	Noir	22G	180 / 7	0.70	10 / 50 / 900
405211	Jaune	20G	150 / 6	-	10 / 50 / 900

