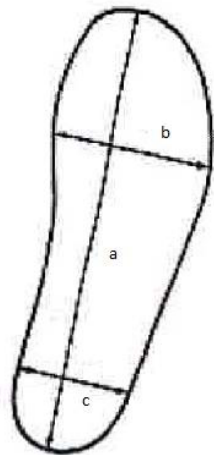



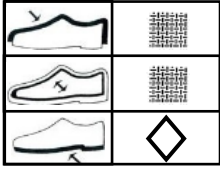
Nombre fabricación:	Wallaby Diabetic®	Referencia:	WADBCCANE
Fabricante:	Celia Ruiz Calzados, SL C/Ciudadela, 18. Pol. Industrial Carrús. 03206 Elx-Elche (Spain) Telf. 965 448 245 Fax: 966 660 098 información@celiaruizcalzados.com		
Nombre comercial:	Wallaby Diabetic.		
Número de combinación:	1		
Clasificación y evaluación de conformidad:	Reglamento Europeo 2017/745. Dispositivo Médico Clase I – Regla 1. Anexo IV (Declaración CE conformidad UE).		

Talla/s:													
Número	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Medida pie (cm)	24.0	24.7	25.3	26.0	26.7	27.3	28.0	28.7	29.3	30.0	30.7	31.3	32.0
Género	Unisex												

Dimensiones:								
	Talla	36	37	38	39	40	41	42
	(a) mm	240	247	253	260	267	273	280
	(b) mm	91	93	95	97	99	101	103
	(c) mm	60,5	62	63,5	65	66,5	68	69,5
	Talla	43	44	45	46	47	48	
	(a) mm	287	293	300	307	313	320	
	(b) mm	105	107	109	111	113	113	
	(c) mm	71	72,5	74	75,5	77	79	

Descripción del producto:	Fotografía/s:
<ul style="list-style-type: none"> • Calzado diseñado con horma unisex, para personas con problemas de ulceraciones o isquemias, que requieran de ancho especial y un material que les proporcione un mayor calce y confort. • Es un calzado cerrado, con copete alto en un empeine ancho y con un discreto cierre de velcro delantero se facilita la apertura gracias al corte doblado formando una sola pieza. • La plantilla es extraíble lo que permite el uso de una plantilla ortopédica. • Presenta un tejido de diversos cortes. El forro interior lo encontramos de varias formas, todos estos tejidos internos proporcionan las cualidades bacteriostáticas e hipoalergénicas. Por lo que evita la degradación del forro y malos olores. • El tejido exterior ligeramente elástico pensado para grandes deformidades en el antepié. • La suela es de alta densidad y resistencia a la abrasión. Por lo que la hace antideslizante, proporcionando un buen agarre en la marcha. 	

<p>Aplicación terapéutica:</p>	<p>Es un producto sanitario recomendado para personas con Diabetes Mellitus Tipo I y II, por sus propiedades bacteriostáticas, sus anchos especiales, el fácil calce y sus forros técnicos.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Diabetes Mellitus Tipo I y Tipo II, esta enfermedad puede cursar con: <ul style="list-style-type: none"> o Síndrome de Charcot Marie Tooht. o Ulceras en todas las zonas de los pies. o Neuropatías. o Vasculitis. o Deformidades en el Empeine o Deformidades en los dedos. o Afecciones en uñas. o Síndrome de Metatarsalgias y Talalgias. o Problemas de anchos generalizados.
--------------------------------	---

Composición del producto:	
Tejido externo:	Tejido 100% poliéster.
Tejido interno:	100% fibras de poliéster Coolmax / Carbón.
Foamizado:	Espuma de Poliéster, Poliéter y Poliuretano
Ribete:	100% poliéster
Sistema de cierre:	100% poliamida
Plantilla interior:	Fibras de poliéster Coolmax / Carbón.
Plantilla extraíble:	Espuma de látex sintético (butadieno-estireno) color verde, viscoelástico rizo con fibra poliéster Coolmax / Carbón.
Suela:	Caucho natural (Látex)
Relleno suela:	Granulado de corcho natural (98%), con ligante de PU (2%)
Pictogramas:	

Precauciones:

Lea atentamente estas instrucciones de uso antes de usar el producto. Verifique previamente que el envase incluye un producto idéntico a la imagen de la etiqueta del envase, y no haya sufrido daños.

Cualquier alteración de las propiedades del producto o de sus prestaciones debe hacer desistir de su uso, y la anomalía debe ser comunicada de inmediato al fabricante.

Debido a sus propiedades de fabricación en los primeros lavados la plantilla extraíble, podría apreciarse un producto jabonoso. Este jabón no altera las características del calzado, pero no debe estar en contacto con mucosas.

Advertencias:


Este calzado Wallaby Diabetic® no debe usarse por personas con **hipersensibilidad** a cualquiera de los elementos constituyentes del producto. **Contraindicado** a personas con alergia al Látex, ya que la suela contiene goma natural.

Ante un incidente Grave (*muerte o deterioro grave de la salud*) debe hacerse la comunicación al fabricante y a la autoridad competente en el estado.


Conservación y Mantenimiento:



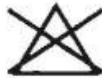


Mantener siempre en un lugar fresco y seco. Guardar el producto de forma segura.

Para la limpieza de los tejidos del calzado se debe utilizar un jabón neutro para prendas delicadas. Lavar a mano con agua templada y aclarar bien. Secar lejos de una fuente de calor (nunca secadora ni radiador).

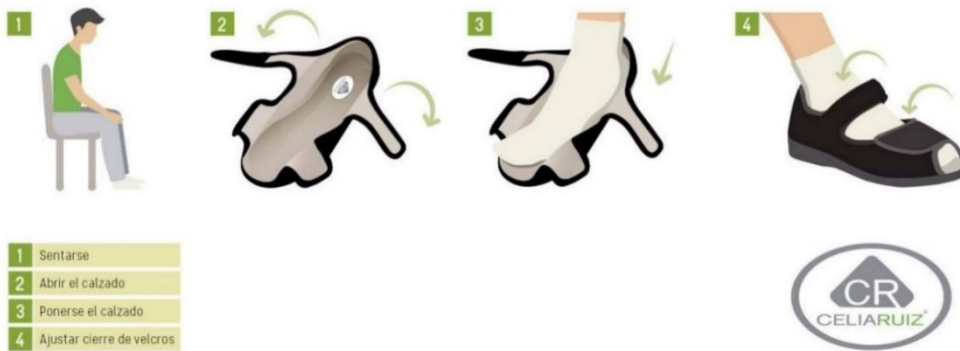

Instrucciones de Uso:



Identificación de marcas:	
	Marcado CE
	Lote
	Fabricante
REF	Número de catálogo
	Consúltense las Instrucciones de Uso.
	Alergénico Contiene Látex