

<i>Description générale</i>	Bracelet d'identification inviolables pour adultes et enfants de plus de 2 ans		
<i>Classe du DM</i>	N'est pas considéré comme un Dispositif médical pas de marquage CE		
<i>Pièces jointes</i>	Oui	Photo, et schéma technique	
<i>Référence lot</i>	Oui	Voir sur la boîte	
<i>Dispositif raccordé</i>	Non		
<i>Dispositif Usage Unique</i>	Oui	Mono patient pendant l'utilisation puis jetable	
<i>Dispositif stérile</i>	Non		
<i>Stérilisation</i>	Oui	À l'oxyde d'éthylène et chimique. Pas à air chaud ou gamma	
<i>Autoclavable</i>	Non		
<i>Nettoyage</i>	Oui	Avec une solution n'attaquant pas le PVC, au détergent	
<i>Substance impropre</i>	Produit attaquant le PVC comme le l'acétone, le benzène, le chloroforme.		
<i>Pièces constitutives</i>	Oui	Un bracelet, une étiquette et un stylo permanent.	
<i>Matières</i>	En PVC pour le bracelet et en papier pour l'étiquette. Hypoallergénique.		
<i>Contient du latex</i>	Non		
<i>Norme</i>	EN 71		
<i>Etiquetage</i>	Oui	Nom, référence, lot, usage unique, quantité.	
<i>Emballage</i>	Oui	Boîte en carton de 100 bracelets.	
<i>Stockage particulier</i>	Oui	Sec et propre.	
<i>Durée d'utilisation</i>	Moyenne		
<i>Marquage sur le DM</i>	Non		
<i>Références + extensions</i>	16 105 46	16 106 40	16 106 41
<i>Désignation</i>	Adulte	Enfants rose	Enfant bleu
<i>Dimensions Lo x La x H (mm) +- 3mm</i>	250 x 25 x 12	170 x 19 x 12	
<i>Diamètre d'utilisation (mm)</i>	Min = 20 ; Max = 70	Min = 20 ; Max = 45	
<i>Epaisseur (mm)</i>	0.5		
<i>Poids net par 100 g (g)</i>	232		
<i>Couleurs</i>	transparent	rose	bleu
<i>Resistance température (°C)</i>	-20 à +70°C		
<i>Taux de réversibilité de flexibilité</i>	Rigide		
<i>Utilisation</i>	Dispositif inviolable permettant l'identification des personnes		
<i>Mode d'emploi</i>	1/ Prendre un bracelet et inscrire le nom de la personne soit sur l'étiquette soit directement sur le bracelet, côté fenêtre, avec le feutre à écriture permanente. 2/ Insérer l'étiquette avec l'inscription du côté du plastique transparent jusqu'au bout et garder en main la partie détachable, détachez ensuite le bout détachable. 3/ Mettez le bracelet autour de la partie à identifier en gardant le côté transparent vers l'extérieur pour pouvoir lire le nom. 4/ choisissez la longueur voulue en insérant la pointe dans le trou choisi en fonction du diamètre de la partie à identifier. 5/ Rabattre le clip de fermeture sur le pignon en serrant fort jusqu'à entendre le bruit du clip de verrouillage. Vérifier si ce dernier est bien installé. 6/ Coupez si nécessaire la languette restante en prenant soin de ne pas laisser de bord coupant. 7/ Pour enlever le bracelet, coupez la languette avec des ciseaux adéquat..		
<i>Précaution d'emploi et/ou avertissement usage unique</i>	Ce dispositif ne peut être utilisé que par une personne compétente et qualifiée. A utiliser en usage unique par personne. Ne serrez pas le bracelet à fond mais laisser un espace suffisant, le bracelet doit toujours pouvoir bouger. Ne pas laisser de bord tranchant. Bien vérifier que le bracelet est fermé en tirant légèrement dessus et qu'il ne peut glisser hors du poignet . Ne pas chauffer le dispositif ou le laisser sur la peau en contact serré et permanent ou sur des plaies ouvertes.		
<i>Recyclage</i>	Oui		
<i>Récupération</i>	Dans les bacs de déchets plastiques		
<i>DEEE/REACH</i>	Non/ NC		
<i>Phtalates/PVC</i>	Non/ Oui		
<i>Données de sécurité</i>	Phrases R = Nul Combinaison de phrases = Nul		