

BOCK A LAVEMENT COMED



Description

Ce Bock à lavement Comed permet de contenir 2 litres de solutions de lavement et possède 2 canules et 1 robinet, pour un lavement des parties génitales et rectales. Pour réaliser le lavement, il faut préparer correctement le dispositif de lavement. Tout d'abord, il faut mettre le tuyau sur le bock et le robinet sur le tuyau puis il faut visser la canule (vaginale ou rectale) sur le robinet. Une fois installé, la canule du bock à lavement peut être introduit dans l'orifice et la douche vaginale ou rectale peut commencer.

Une des stérilisations recommandées (essentiellement pour les canules) est la méthode par autoclave, qui doit se faire pendant 20 minutes à 121° mais il est également possible de le faire à l'oxyde d'éthylène. Le nettoyage du Bock, peut quant à lui être réaliser en machine ou avec du liquide vaisselle, du détergent, de l'eau de javel ou tout autres produits nettoyants qui n'est pas nocif pour le PVC, l'ABS et le LDPE.

Caractéristiques

- Contenance de 2 litres (bock)
- Livré avec 1 tuyau, 1 robinet, 2 canules
- Autoclavable : 20 minutes à 121°