

Ciseaux de Metzenbaum



Description du Produit :

Cette paire de ciseaux de Metzenbaum permet d'inciser la peau avec précision et dextérité. Ils sont utilisés pour des soins ou des actes chirurgicaux.

Avec son long manche et ses lames courtes à bout mousse, les ciseaux Metzenbaum sont prévus pour écarter les tissus et les organes sans les endommager, notamment lors de dissections. Ils permettent également de couper des vaisseaux avec finesse.

Produit médical idéal pour sectionner avec précision ou après une incision au bistouri.

Ciseaux droits de 14 cm en acier inoxydable pour un usage médical à bout mousse.

Solides, durables et résistants.

Marquage CE

Entretien :

Bien nettoyer avec un nettoyeur ultrason, désinfecter et stériliser les ciseaux avant la première utilisation.

Stériliser le ciseau par autoclave à l'oxyde d'éthylène (134°C pendant 18 minutes) dès que possible après utilisation.

Après la stérilisation, laissez refroidir un moment.

Pour nettoyer le ciseau Metzenbaum, appliquer un détergent doux (de type Steranios).

Éviter tout produit qui attaque l'acier inoxydable.

Ne pas utiliser de brosse ou d'éponge métallique.

Toujours bien rincer et sécher les ciseaux avant usage.

Éliminer le ciseau de Metzenbaum dans un contenant DASRI adapté.

L'usage de ce produit est réservé aux professionnels de santé.