

# **NOTICE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN DES MATELAS IMMOBILISATEUR A DEPRESSION**

## **Garantie 3 ans contre tout vice de fabrication.**

Vous venez d'acquérir un matelas immobilisateur de marque Dumont Sécurité, et nous vous en remercions.

Ce produit permet l'immobilisation et le transfert d'un blessé depuis le lieu de l'accident, jusqu'à son admission en structure hospitalière.

L'immobilisation totale d'une personne à l'aide de ce produit permet d'éviter l'aggravation des traumatismes.

L'utilisation de ce produit doit faire l'objet de précautions particulières.

Un entretien régulier est nécessaire afin d'éviter les risques de contamination.

Les consignes d'utilisation et d'entretien suivantes permettent d'utiliser ce produit de manière correcte et de lui garantir une longévité optimale.

## **INFORMATION SUR LE PRODUIT**

Les matelas Dumont Sécurité font l'objet de contrôles à plusieurs stades de leur fabrication et sont en tous points conformes aux normes et règlements en vigueur. Ils sont testés en dépression avant leur livraison.

Il résiste aux températures extrêmes : -30°C à +70°C

## **Mode d'emploi :**

Poser le matelas au sol après avoir vérifié qu'il ne risque pas d'être endommagé ou percé par des objets pointus ou acérés. Disposer le matelas en prenant soin de laisser apparaître la totalité des sangles sur les côtés et tirer les boucles à l'extrémité de ces dernières pour obtenir leur longueur maximum.

Après avoir réparti les billes de manière homogène, placer la victime sur le matelas en respectant les précautions d'usage pour la manipulation des personnes blessées. Pour respecter le sens d'utilisation, disposer les pieds du côté valve.

*NB : si l'état de la victime nécessite la pose d'un collier cervical, ce dernier devra être placé avant la mise en dépression.*

Relever les bords du matelas de chaque côté en repoussant les billes contre la victime. Tenir les bords relevés à chaque extrémité jusqu'à la dépression complète afin de bien immobiliser notamment la partie à la tête et aux pieds.

Après s'être assuré que le tuyau est positionné sur la sortie "dépression" de la pompe, le connecter à la valve du matelas. S'assurer que le robinet est bien ouvert et pomper jusqu'à la dépression souhaitée ou jusqu'à ce que le vide maxi soit atteint. Fermer alors le robinet et déconnecter la pompe.

Mettre en place les sangles puis tirer sur les extrémités de ces dernières pour obtenir le réglage assurant un bon maintien. Veiller à ne pas trop appuyer sur le thorax de la victime.

*NB : Pour l'immobilisation de femmes enceintes, il est possible d'invertir les boucles des deux sangles les plus proches du pied afin de former un X avec ces dernières et ainsi d'éviter toute pression sur l'abdomen. Pour les interventions de très longue durée, il peut être nécessaire de renouveler l'opération précédente pour compenser le tassement des billes et assurer ainsi une rigidité maximum du matelas, pendant toute l'opération.*

Pour le portage, utiliser les poignées latérales, si possible de manière symétrique pour obtenir un bon équilibre.

En cas de transport de victime dans une ambulance en mouvement, victime dans le matelas et matelas posé sur le brancard d'ambulance, utiliser les sangles et harnais du brancard pour immobiliser l'ensemble victime-matelas sur le brancard.

### **Stockage du matelas :**

Le matelas peut rester posé sur le brancard et il faut alors fixer les sangles entre elles pour qu'elles ne gênent pas et qu'elles ne soient pas accrochées accidentellement.

Le matelas peut être également plié en trois, maintenu par les sangles croisées.

Une dépression légère réduira son encombrement.

### **Nettoyage et entretien du matelas :**

Lorsque le matelas est souillé, le nettoyer avec de l'eau tiède savonneuse.

Ne pas utiliser de produits agressifs, alcalins, alcool, solvants, etc.

Sécher ensuite avec un chiffon doux.

### **Étiquette d'identification du produit :**

Chaque matelas est identifiable facilement grâce à son étiquette d'identification sur laquelle figure l'ensemble des informations relatives au produit, au fabricant, au distributeur en respect avec la réglementation européenne sur les Dispositifs Médicaux selon EU MDR 2017/745.

Cette étiquette se trouve sous une fenêtre cristal de façon à directement visible.

Pour tout renseignement, contacter votre distributeur ou notre Service Après-Vente :

**DUMONT SECURITE**  
**9 rue Lucien Rosengart – BP 621**  
**01506 AMBERIEU EN BUGEY CEDEX**  
**Tel : 04 74 46 13 00 - Fax : 04 74 38 35 22**  
**E-mail : [info@dumont-securite.fr](mailto:info@dumont-securite.fr)**

