

Medi'Care+

Thermomètre rigide

Ce thermomètre à embout rigide, est conçu pour mesurer la température **buccale, rectale** et **axillaire** (sous l'aisselle). Il peut être utilisé à domicile ou à l'hôpital.

Veillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser le thermomètre et conservez-les pour toute consultation ultérieure.

SOMMAIRE

1. Utilisation du thermomètre
2. Zones de mesure
 - Température axillaire (sous l'aisselle)
 - Température par voie orale
 - Température par voie rectale
3. Interprétation des résultats
4. Avertissements - informations importantes
5. Changement d'unité (°C/°F)
6. Nettoyage, désinfection et stockage
7. Maintenance et remplacement de la pile
8. Spécifications
9. Elimination
10. Garantie

1. UTILISATION DU THERMOMÈTRE

- Désinfectez la sonde avant utilisation.
- Appuyez sur le bouton ON/OFF pour allumer l'appareil. Un bip court retentit, indiquant que le thermomètre est opérationnel.
- L'écran affiche tous les segments numériques pendant un test automatique.
- Lorsque « Lo » et un « °C » ou « °F » clignotant apparaissent, le thermomètre est prêt à l'emploi.
- Pendant la mesure, la température actuelle s'affiche en continu et le symbole °C ou °F clignote.
- Une fois la mesure terminée, un bip retentit et le symbole cesse de clignoter.
- La température maximale mesurée reste affichée.
- Appuyez sur le bouton ON/OFF pour éteindre le thermomètre. Il s'éteint automatiquement après 8 à 10 minutes.

2. ZONES DE MESURES

Température axillaire (sous l'aisselle) :

- Séchez l'aisselle au préalable. Placez la sonde et gardez le bras collé au corps.
- Temps de mesure : environ 120 secondes.
Si les aisselles sont froides, prolonger la mesure de 5 minutes. Température normale : **35,2 °C à 37 °C** (95,4 à 98,6 °F).

Température par voie orale :

- Placez l'embout sous la langue, dans une poche de chaleur à l'arrière. Gardez la bouche fermée et respirez par le nez. Ne pas manger ou boire avant la mesure.
- Temps de mesure : environ 120 secondes. Température normale : **35,7 °C à 37,3 °C** (96,8 à 99,1 °F).

Température par voie rectale :

- Méthode la plus précise. Insérez l'embout dans le rectum sur 2 cm maximum.
Temps de mesure : environ 50 secondes. Température normale : **36,5 °C à 37,6 °C** (97,7 à 99,7°F).

3. INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS

- Si la température est inférieure à 32°C ou 90,0°F, "Lo°C" ou "Lo°F" s'affiche.
- Si elle est supérieure à 42,9°C ou 109,9°F, "HI°C" ou "HI°F" s'affiche.

4. AVERTISSEMENTS - INFORMATIONS IMPORTANTES

- Nettoyez et désinfectez avant la première utilisation et après chaque mesure.
- Ne pas utiliser de produits abrasifs ni plonger dans l'eau bouillante.
- Laissez l'appareil s'adapter à la température ambiante avant utilisation.
- Déconseillé en usage rectal pour les personnes ayant des hémorroïdes.
- Tenir hors de portée des enfants et ne jamais les laisser seuls pendant la mesure.
- Ne pas laisser tomber ni plier excessivement le thermomètre.
- Éviter soleil, chaleur, flammes, eau chaude.
- Un embout de protection peut entraîner un écart de $\pm 0,1$ °C (0,2 °F).
- Attendre après avoir bu ou mangé chaud/froid, fait du sport, nagé ou pris un bain.
- Éloigner des champs électromagnétiques puissants.
- Ne pas modifier l'appareil.


5. CHANGEMENT D'UNITÉ (°C/°F)

- Thermomètre éteint : maintenir ON/OFF 3 à 4 secondes.
- L'affichage bascule entre °C et °F.
- La dernière mesure est effacée lors du changement d'unité.

6. NETTOYAGE, DÉSINFECTION ET STOCKAGE

- Nettoyez avec un chiffon imbibé d'alcool à 70 %.
- Ne pas immerger l'appareil ni laisser l'eau pénétrer dans l'écran LCD.
- Conservez à température ambiante, au sec, à l'abri de la chaleur et du soleil.
- Retirez la pile en cas de non-utilisation prolongée.

7. MAINTENANCE ET REMPLACEMENT DE LA PILE

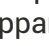- Aucun recalibrage périodique nécessaire.
- Ne pas tenter de réparer l'appareil.
- Si le symbole  apparaît, remplacez la pile bouton LR41 1,5 V :
 - Retirez le couvercle du compartiment.
 - Tirez le cadre intérieur sur 1 cm.
 - Retirez la pile à l'aide d'une pince.
 - Placez une pile neuve.
 - Refermez le compartiment.
- Jetez la pile usagée conformément à la réglementation locale.

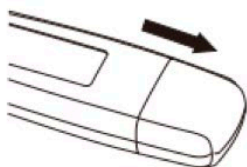


Figure 1

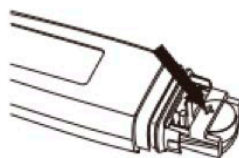


Figure 2

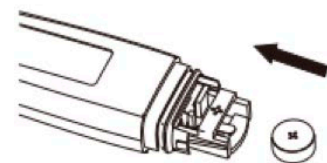


Figure 3

8. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle	Thermomètre rigide
Dimension du thermomètre	125,5 x 18 x 10 mm
Intervalle	32°C-42,9°C (89,6°F-109,2°F)
Précision : à température ambiante standard de 25°C (77°F)	±0,1°C, 35,5°C-42,0°C ±0,2°F, 95,9°F-107,6°F ±0,2 en dessous de 35,5°C ou au-dessous de 42°C. ±0,4 en dessous de 95,9°F ou au-dessus de 107,6°F
Temps de mesure	Environ 10 secondes
Affichage	Ecran LCD 3,5 positions
Mémoire	Enregistre la dernière valeur mesurée
Pile	Pile-bouton 1,5V (taille SR41, UCC, 392 ou LR41)
Consommation d'énergie	0,15 milliwatt en mode mesure
Durée de vie de la pile	Env. 200 heures
Poids	Env. 11 g
Conditions environnementales	Température : 10°C - 40°C (50°F – 104 °F) Humidité relative : 15 % - 95 %
Alerte en cas de fièvre	≥ 37,5°C (99,5°F) l'appareil bipera rapidement pendant 10 secondes
Température <32°C (89,6°F)	Affichage symbole « Lo°C » ou « Lo°F »
Température >42,9°C (109,2°F)	Affichage symbole « Hi °C» ou « Hi °F »
Référence	HEXTR25
Référence fournisseur	GF-MT101
EAN	3760178861205

9. ELIMINATION

- Jetez l'appareil conformément à la réglementation locale en vigueur.
- Dans l'Union européenne, déposez-le dans un point de collecte public prévu à cet effet (Directive DEEE 2012/19/EU).
- Pour toute question, contactez votre service local de gestion des déchets.
- Afin de protéger l'environnement, déposez les piles usagées dans les conteneurs prévus dans les magasins ou dans les points de collecte officiels.

10. GARANTIE

- Garantie de 2 ans à partir de la date de sortie d'usine.
- Les dommages dus à une mauvaise utilisation ne sont pas couverts.
- La pile et l'emballage sont exclus de la garantie.



Importé et distribué par Hexa Plus Santé
ZA Panisso Est - 2, rue des Micocouliers
66600 Rivesaltes - France
(+33) 4 68 08 26 20



Hangzhou Universal Electronic Co., Ltd.
298 Yunxi Road, Cangqian Street,
Yuhang District, 311121 Hangzhou China



SHARE INFO GMBHHEERDTER LOHWEG 83, 40549DÜSSELDORF
Doc.: GF/OM-MT V:2.0