




## Accroche-canne 09 111 6615 (10158)

### INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Cet accroche-canne à clip permet d'éviter tout risque de chute d'une canne placée contre une table. Grâce à ses deux coussinets antidérapants, l'accroche-canne peut être posé sur le rebord d'une table ou bloqué en dessous, afin de maintenir fermement la canne. Il est parfaitement adapté aux cannes dont le manche ne dépasse pas 2,5 cm de diamètre.

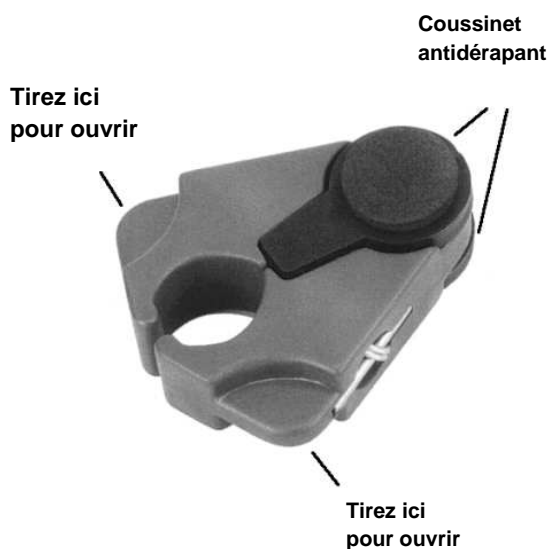

### ACCROCHER LA CANNE

1. Tirez les deux côtés du clip afin d'ouvrir l'accroche-canne et placez-le autour du manche de la canne.
2. Posez la canne sur le sol.
3. Faites glisser l'accroche-canne le long du manche jusqu'à ce que le coussinet antidérapant soit bloqué sous la table ou placez-le sur le rebord.

### INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE

Nettoyez l'accroche-canne à l'aide d'un nettoyant non abrasif. Séchez-le soigneusement.

**Fabriqué pour :**  
Valentine International Ltd., Taïwan, République de Chine

**Représentant européen agréé :**  
Medical Specialities Limited, BB12QQ, Angleterre  
Fabriqué à Taïwan