

# LOUPE RONDE



Référence	Désignation
CT03LOU03	Loupe ronde

## Atouts :

- Permet un confort de lecture optimale.
- Puissance de grossissement de x8
- Equipée de deux LED.
- Bonne prise en main grâce à son manche ergonomique.

## Mode d'emploi :

- Sortir le produit de son emballage et insérer les piles. Pour insérer les piles : faire glisser vers le bas le couvercle du compartiment à piles situé sous le manche ergonomique. Insérer les piles et respecter les polarités. Replacer le couvercle.
- La loupe peut être utilisée avec ou sans la lumière. Pour activer la lumière à LED, pousser le bouton vers le haut.

## Description :

- Alimentation : 2 piles AA – LR6 (non fournies)
- Diamètre de la loupe asphérique : 9 cm
- Longueur : 21 cm
- Poids net : 100 g (sans alimentation)

## Composition :

- Manche : ABS
- Lentille : acrylique

## Précautions d'emploi :

- Tenir éloigné des endroits humides et de toute source de produit liquide.
- Ne pas placer le produit dans l'eau.
- Lors du changement des piles, placer des piles neuves et identiques et respecter la polarité.
- Ne pas jeter les piles usagées dans les déchets ménagers.
- Ne pas laisser les piles dans le compartiment en cas de non utilisation prolongée.
- Tenir hors de portée des enfants.
- PharmaOuest Industries ne peut être tenu responsable de tous dommages liés à une utilisation non conforme du produit.

## Conditionnement :

- A l'unité, sous boîte carton, encombrement : 9 x 25 x 5 cm.
- Poids brut : 135 g.

