

Huile de soin

Adjuvant topique de prévention de l'escarre et de surveillance des points d'appui par effleurage. Patients, ayant la peau fragile et présentant un risque d'escarre faible à modéré (stade 0)

Ce produit est un dispositif médical de prévention de l'escarre*



Galénique huile qui facilite le geste d'effleurage

Testé sous contrôle dermatologique

Fabriqué en France

Version A – Avril 2023

INDICATIONS

- Adjuvant de prévention de l'escarre et surveillance des points d'appuis par effleurage
- Améliore l'état cutané par ses propriétés hydratantes
- Adultes et enfants > 36 mois, présentant un risque faible à modéré d'escarres
- Peaux fragiles

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES ET PHYSICO-CHIMIQUES

Aspect : liquide limpide à trouble
Couleur : incolore à jaune très pâle
Odeur : note verte, hespéridé, aromatique, florale
Masse volumique à 20°C : 0,86 +/- 0,02 g/ml

TOLERANCE

- Tolérance cutanée : non irritant, bonne tolérance cutanée globale
- Tolérance oculaire : pratiquement non irritant à faiblement irritant
- Testé sous contrôle dermatologique

les rapports d'études sont à disposition des professionnels sur demande.

COMPOSITION INCI

PARAFFINUM LIQUIDUM (MINERAL OIL), PROPYLENE GLYCOL DIPELARGONATE, PRUNUS AMYGDALUS DULCIS (SWEET ALMOND) OIL, PARFUM (FRAGRANCE)

COMPOSITION

Contient de l'huile minérale, de l'huile d'amande douce hydratante, un agent émollient améliorant la souplesse de la peau (propylène glycol dipelargonate), parfum.

Formule sans eau, ne nécessitant donc pas de conservateurs.

PROPRIETES

Caractéristiques	Avantages
Galénique huile	Glissement amélioré de la peau sous les doigts, pénètre rapidement sans laisser la peau collante
Contient ingrédients émollients	Hydrate les couches superficielles de l'épiderme Préviennent le dessèchement cutané
Enrichie en huile d'amande douce	Préserve le film lipidique au niveau de l'épiderme
Note verte, hespéridé, aromatique, florale	Parfum agréable pour les patients comme pour les soignants

CONSEILS D'UTILISATION

L'effleurage est geste léger qui s'exécute sur peau propre, à mains nues (sans gants), en utilisant les doigts à plat et la paume de la main, sans dépression des éléments sous-cutanés (à différencier du massage) à l'aide du dispositif pour faciliter le glissement du geste .

2 à 6 fois par jour en effleurage jusqu'à pénétration.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Ne pas avaler. Ne pas utiliser sur une peau lésée. Ne pas appliquer sur les yeux et les muqueuses. Tenir hors de portée des enfants.

PRESENTATION

Réseau	Présentation	Code	Code EAN	Conditionnement	Composition du contenant
B2B	Flacon 50 ml	65214	3361370652143	Carton de 50	Flacon : PEHD Pompe : Multimatériaux & Capsule : PP

INFORMATIONS PRATIQUES

Durée de conservation : 48 mois

Durée d'utilisation après ouverture : 9 mois

Consigne de tri :



Statut : *Dispositif médical de classe I

Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE

CONTACTS

